

► Gebrauchsanweisung

Technische Daten:

Art.-Nr.: 46 010 Betaufrichter zur Wandbefestigung			
Material:	Gestell Stahlrohr, Griff / Gurt Kunststoff	Tragarm Stahl, Länge:	ca. 73 cm
Farbe:	grau	max. Tragkraft:	100 kg
Höhenverstellung Gurt:	ca. 34 - 50 cm Oberkante Bettgalgen bis Grifffläche	Schwenkbereich:	Halbkreis im Radius von 73 cm
Befestigungsplatte:	ca. 30 x 20 cm, Stahl lackiert	Gewicht:	ca. 11,5 kg

Das Hilfsmittel ist auf eine Nutzungsdauer von ca. 10 Jahren ausgelegt.

- Jede Handhabung dieses Produktes setzt die genaue Kenntnis und Beachtung dieser Gebrauchsanweisung voraus. Daher ist sie sorgfältig bis zur Entsorgung aufzubewahren. Um Bedienungsfehler zu vermeiden und einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten, muss die Gebrauchsanweisung dem Bedienungspersonal jederzeit zugänglich sein.
- Vor jeder Handhabung ist der feste Sitz des Betaufrichters an der Wand zu überprüfen!
- Die Belastbarkeit des Betaufrichters darf maximal 100 kg betragen (Zugkraft)!
- Die Montage hat aus Sicherheitsgründen von einem Fachmann zu erfolgen.
- Montieren Sie den Betaufrichter immer parallel zum Bett!
- Nicht am Griff schaukeln oder zum Hochrutschen im Bett verwenden.
- Sind Teile des Betaufrichters verbogen oder verformt, darf dieser nicht mehr benutzt werden!
- Achtung, kein Spielzeug! Lassen Sie Ihre Kinder nicht unbeaufsichtigt im Zimmer mit dem Betaufrichter!
- Der Betaufrichter kann im Temperaturbereich von 10 - 60°C eingesetzt werden!
- Bringen Sie keine anderen Teile oder Gegenstände an den Betaufrichter an!

Garantie: Laut den gesetzlichen Gewährleistungsansprüchen. Von der Garantie ausgenommen: Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch, normaler Verschleiß und Verbrauch sowie Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Gerätes nur unerheblich beeinflussen. Technische Änderungen und Anbauten sowie unsachgemäße Wartungsarbeiten führen zum Erlöschen der Garantie und der Produkthaftung allgemein. Wir behalten uns Änderungen vor, die der technischen Verbesserung dienen.

Betaufrichter zur Wandbefestigung

Art.-Nr. 46 010

HMV-Nr.: 19.40.02.2023

50.45.02.2023



► Bettaufrichter zur Wandbefestigung

Verwendungszweck:

Der Bettaufrichter ist ein Hilfsmittel für Personen, die sich nicht allein im Bett aufrichten können. Die Restkräfte des Oberkörpers und der Arme müssen noch ausreichend vorhanden sein.

Voraussetzungen:

- Der Bettaufrichter ist bei allen Betten einsetzbar.
- Der Bereich, in dem der Bettaufrichter montiert werden soll, muss von einem Fachmann auf Eignung geprüft werden.

Montage:

- Der Bettaufrichter wird mit Schrauben und Dübeln durch die sechs auf der Befestigungsplatte vorgegebenen Bohrlöcher an der Wand befestigt. Es wird kein Befestigungsmaterial mitgeliefert, da sowohl Wandbeschaffenheit als auch passende Befestigungsmittel von einem Fachmann für Befestigungstechnik geprüft bzw. ausgewählt werden müssen. Feste Wandtypen wie Beton, Kalksandstein etc. eignen sich für die Montage des Aufrichters am besten.
- Die Befestigung erfolgt vorzugsweise mittig am Kopfende des Bettes in vorher ausgewählter Höhe, so dass aufgrund der Verstellmöglichkeit des Gurtbandes die Triangel vom Patienten gut erreicht werden kann.
- Der Tragarm ist halbkreisförmig nach links und rechts in einem Radius von 73 cm schwenkbar, dies bitte bei der Montage berücksichtigen.
- Nach der Montage des Gestells wird der Haltegriff in die dafür vorgesehene Halterung eingehängt. Das Gurtband muss sich zwischen den Stiften befinden. Die Länge des Gurtbandes kann mit Hilfe der Verstell-Schnalle individuell eingestellt werden (siehe Benutzung).

Indikation:

- Für das eigenständige Aufrichten im Bett
- Für das Anheben des Gesäßes für die Stechbeckenbenutzung
- Für das Umsetzen in einen Rollstuhl oder Toilettenstuhl

Kontraindikation:

- Bei Rückenverletzungen sollte kein Bettaufrichter angebracht werden.
- Bei Apoplexpatienten und Hemiplegiker darf auch kein Bettaufrichter angebracht werden.

Vor jeder Benutzung:

- Achten Sie darauf, dass sich das Gurtband des Griffes zwischen den Führungsstiften befindet.
- Überprüfen Sie regelmäßig alle Schrauben auf festen Sitz.
- Überprüfen Sie das Gurtband und die Triangel auf evtl. Beschädigungen.

Benutzung:

- Der Tragarm mit dem Griff muss parallel zum Bett zeigen. Der Griff ist auf die entsprechende Höhe einzustellen.
- Der Griff sollte sich über dem Brustkorb in Kinnhöhe befinden.
- Der Bettaufrichter darf nur senkrecht belastet werden.
- Schaukeln Sie nicht mit dem Griff hin und her. Es besteht Kippgefahr!
- Zum Umsetzen in einen Roll- oder Toilettenstuhl muss immer eine Pflegeperson Hilfestellung geben.

Desinfektion / Reinigung:

- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen oder scheuernden Gegenstände oder Reinigungsmittel.
- Alle lackierten Metallteile reinigen Sie am besten mit einem feuchten Tuch unter Verwendung handelsüblicher, milder Haushaltsreiniger.
- Die Reinigung der Kunststoffelemente erfolgt am besten mittels eines feuchten Tuchs ohne Reinigungsmittelzusätze. Zur Pflege der Kunststoffoberflächen sollte ein speziell für Kunststoff geeignetes Produkt verwendet werden.

Desinfektion: Der Bettaufrichter kann mit einem handelsüblichen Desinfektionsmittel, das sich für Kunststoffe und Lacke eignet, desinfiziert werden.

Wichtig: Bei der Verwendung von Desinfektionsmitteln sind die Anwendungsvorschriften der Hersteller zu beachten.

Wiedereinsatz:

- Vor jedem Patientenwechsel ist der Bettaufrichter zu reinigen und einer Wartung zu unterziehen.
- Die Reinigung ist auf Grundlage der RL des Robert-Koch-Instituts (RKI) für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention durchzuführen.

Wartung:

Monatliche Überprüfung der Schweißnähte sowie des Griffes. Hierbei ist unbedingt auf Beschädigungen des Gurtbandes zu achten. Defekte Teile müssen sofort ersetzt werden. Es dürfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden.