

## Neo-G orthopedische sportondersteuning

Neo-G is een kwalitatieve reeks sportbraces van Rolyan in one size, bedoeld om variabele compressie en ondersteuning te geven voor, tijdens of na belastende activiteiten.

Neo-G biedt sportondersteuning voor o.a., schouder, elleboog, pols, enkel, knie, knieschijf, duim, bovenbeen, onderbeen en onderrug.

Vervaardigd in Neopreen van slechts 2 mm dik, waardoor de brace niet alleen lichtgewicht en ademend is maar ook gemakkelijk kan gedragen worden tijdens werk- of sportactiviteiten.

Onderhoud:

- met de hand te wassen op 30°C
- drogen op kamertemperatuur
- geen strijkijzer gebruiken

### Neo-G schouderband

Eén maat.



links  
rechts

091159748  
091159730

50,00 ad  
50,00 ad

### Neo-G elleboog Universal

Eén maat, bilateraal bruikbaar.



091160365

34,00 ad

### Neo-G epicondylitis strap - tenniselleboog

De strap is voorzien van een kussentje dat op de pijnlijke zone geplaatst wordt.  
Eén maat, bilateraal bruikbaar.



091160340

28,00 ad

### Neo-G polsband

Eén maat, bilateraal bruikbaar.



091160381

26,00 ad



### Neo-G polsbrace wrap

Eenvoudige en compacte polssteun, snel en gemakkelijk aan te brengen.  
Eén maat, bilateraal bruikbaar.

091160431

26,00 ad



### Neo-G polsbrace, versterkt

Polsbrace met een metalen versterking, deze kan geplooid worden in de meest aangewezen stand. Indien niet nodig kan hij ook verwijderd worden.

links  
rechts

091166586

32,00 ad

091166594

32,00 ad



### Neo-G enkelbrace

Eén maat, bilateraal bruikbaar.

091162056

32,00 ad



### Neo-G lumbale steun

Eén maat.  
Lendenomtrek: maximaal 132 cm.

091160464

44,00 ad



### Neo-G lumbale steun met versterking

Eén maat.  
Lendenomtrek: maximaal 132 cm.

091160472

65,00 ad



## Neo-G bovenbeenbandage

Steunbandage voor de dij en hamstrings.  
Eerst trekt men de middelste band aan, vervolgens doet men hetzelfde met de onderste en de bovenste band tot hij een comfortabele steun geeft.  
Eén maat, bilateraal bruikbaar.  
Omtrek: maximaal 71 cm.

091160654

35,00



## Neo-G kniebrace met versterking

Gebruikt als stabiele steunbrace bij overbelasting van de knie waarbij de druk op de knieschijf vermeden wordt.  
Lateraal is er een versteviging voorzien.  
De bandage wordt midden over de knie aangebracht en vervolgens trekt men de middelste band aan.  
Vervolgens doet men hetzelfde met de onderste en de bovenste band tot hij een comfortabele steun geeft.  
Eén maat, bilateraal bruikbaar.  
Omtrek: maximaal 56 cm (te meten 10 cm boven de knie).

091160639

56,00 ad



## Neo-G kniebrace met scharnierfunctie

Gebruikt als stabiele steunbrace bij overbelasting van de knie waarbij de druk op de knieschijf vermeden wordt.  
Lateraal is er een scharnier voorzien om flexie (buiging) toe te laten met een beperking van de rotatie.  
De bandage wordt midden over de knie aangebracht en vervolgens trekt men de middelste band aan.  
Vervolgens doet men hetzelfde met de onderste en de bovenste band tot hij een comfortabele steun geeft.  
Eén maat, bilateraal bruikbaar.  
Omtrek: maximaal 56 cm (te meten 10 cm boven de knie).

091160647

68,00 ad



## Neo-G kniebrace, open

Wordt gebruikt als steunbrace bij overbelasting van de knie waarbij de druk op de knieschijf vermeden wordt.  
De bandage wordt midden over de knie aangebracht en vervolgens trekt men de middelste band aan.  
Vervolgens doet men hetzelfde met de onderste en de bovenste band tot hij een comfortabele steun geeft.  
Eén maat, bilateraal bruikbaar.  
Omtrek: maximaal 56 cm (te meten 10 cm boven de knie).

091160621

34,00 ad



### Neo-G kniebrace, gesloten

Gebruikt als steunbrace bij overbelasting van de knie. De bandage wordt midden over de knie aangebracht en vervolgens trekt men de middelste band aan. Vervolgens doet men hetzelfde met de onderste en de bovenste band tot hij een comfortabele steun geeft. Eén maat, bilateraal bruikbaar. Omtrek: maximaal 56 cm (te meten 10 cm boven de knie).

091160613

32,00 ad



### Neo-G onderbeenbandage

Eerst trekt men de middelste banden aan, vervolgens doet men hetzelfde met de 3 andere tot hij een comfortabele steun geeft. Eén maat, bilateraal bruikbaar. Omtrek: maximaal 46 cm.

091160662

32,00



### Neo-G patellaband

Voorzien van een zachte rubberen blok die een constante druk geeft op de zone juist onder de knieschijf. Eén maat, bilateraal bruikbaar.

091160597

25,00



### Neo-G duimbrace met versterking

Bandage met een uitneembare versterkingsstrook. De pols en de duim zijn afzonderlijk aan te spannen. Eén maat, bilateraal bruikbaar.

091171420

34,00 ad



### Neo-G bovenbeen/lendencombinatie

Eén maat.

091171404

48,00



## Neo-G Hot & Cold Therapy Disc

Hot/Cold pad die combineerbaar is met de Neo-G braces.

- Hot Therapy helpt bij spier- en gewrichtspijn, stijfheid, spanning, symptomen van artritis e.a.
- Cold Therapy helpt bij spier- en gewrichtszwelling, ontsteking, sport- en overbelastingsletsels, e.a.
- herbruikbaar en flexibel
- blijft relatief soepel, ook bij lage t°
- een hoesje wordt bijgeleverd om de huid te beschermen

Technische info:

- Ø 14,5 cm

14,5 cm

AD156081

11,00

## Schokabsorberende inlegzolen en -hieltjes



### Schokabsorberende inlegzolen Gel Spenco RX™

Deze inlegzool kan indien gewenst bijgeknipt worden met een gewone schaar.

De speciale reeks Spenco RX™ is vervaardigd in closed cell nitrogen injected Spenco® materiaal. Hierdoor krijgt men een uiterst comfortabele oplossing met maximale bescherming van de gewrichten.

maat 35/38

0001501

21,50

maat 38/39

0001502

21,50

maat 40/42

0001503

21,50

maat 43/44

0001504

21,50

maat 45/47

0001505

23,00

maat 48

0001506

21,75



### Schokabsorberend gel hielkussentje Spenco RX™

De speciale reeks Spenco RX™ is vervaardigd in closed cell nitrogen injected Spenco® materiaal. Hierdoor krijgt men een uiterst comfortabele oplossing met maximale bescherming van de gewrichten.

S - maat 36/39

0001521

17,75

M - maat 40/43

0001522

17,75

L - maat 44/48

0001523

17,75