

Urias®-Johnstone handspalk voor contracturen Parsnip

Voor wie ?


Deze kleine opblaasbare handspalk werd speciaal ontwikkeld voor personen met ernstige hand- en vingercontracturen, bv. na CVA.

Wat ?

De Parsnip bestaat uit een kegelvormige opblaasbare Urias®-Johnstonespalk, bekledingen en een pompje.

De bekleding is wasbaar voor extra comfort en hygiëne.

Er worden 2 bekledingen voorzien, zodat deze regelmatig kan gewassen worden zonder dat de persoon de spalk hoeft te missen.

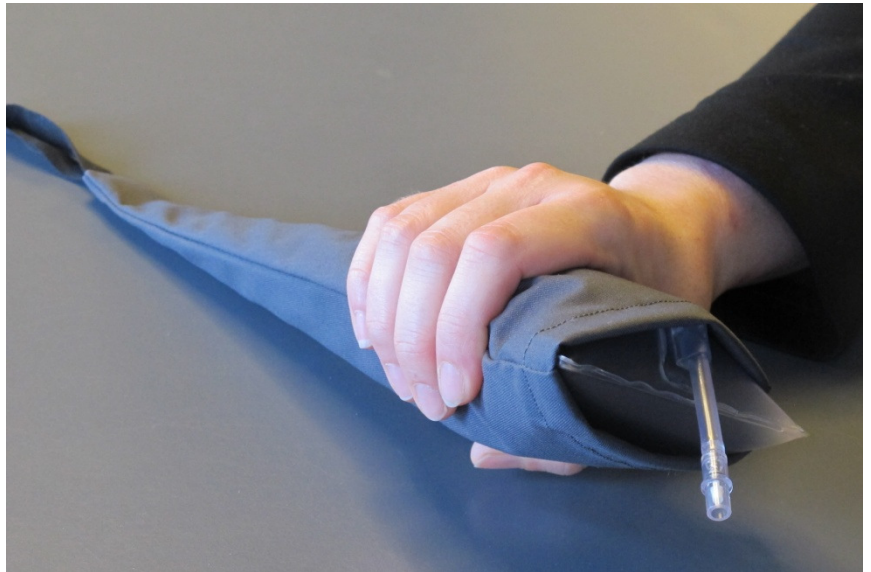

Hoe gebruiken ?


De spalk wordt met de punt vanaf de wijsvinger door de gesloten hand getrokken door aan het lusje te trekken tot de gewenste plaats bereikt is.

Vervolgens pompt men de Urias®-Johnstone spalk op met behulp van het pompje tot de gewenste dikte.

Men gebruikt voor het oppompen de transparante kant van het pompje.

Door het pompje omgekeerd, dwz met de zwarte kant, in het buisje te steken laat men de lucht er terug uit.

De Parsnip spalk is eenvoudig in gebruik en kan ook door een begeleider of familielid aangelegd worden.

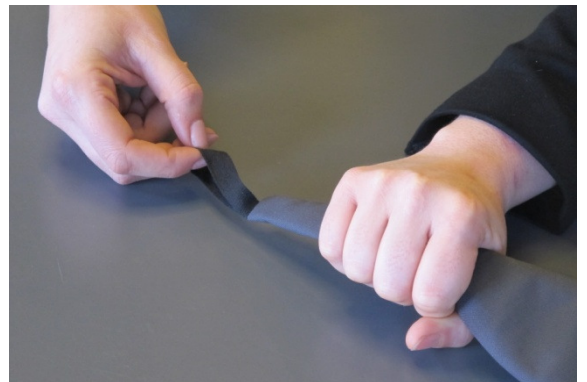


Onderhoud ?

De spalk en de bekleding kan met de hand gewassen worden, gebruik makend van een milde zeep en lauwwater.

ADVYS is erkend verdeler van Urias®-Johnstone spalken.

Het volledig gamma raadpleegt men op www.advys.be

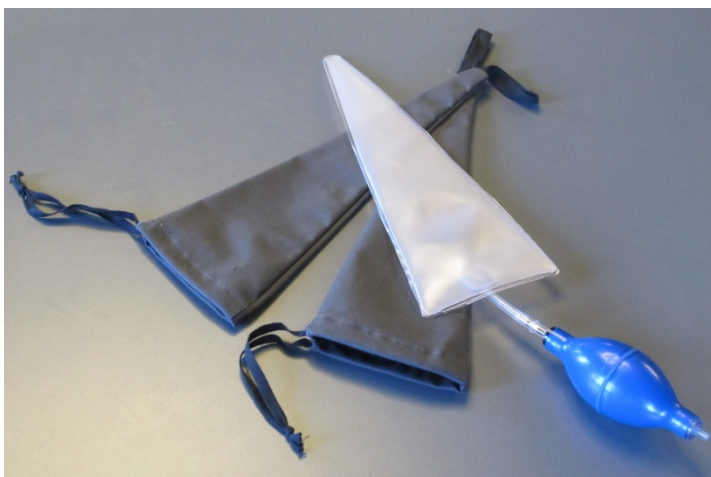

Attelle de main Urias®-Johnstone pour les contractures: Parsnip

Pour qui ?

Cette petite attelle de main a été spécialement conçue pour des personnes qui ont de graves contractures de main et des doigts, par ex. suite à un AVC.


Quoi ?

Le Parsnip est une attelle gonflable d'Urias®-Johnstone en forme de cône avec un revêtement (housse) et une petite pompe. La housse est lavable pour un extra confort et plus d'hygiène. Deux housses sont prévues afin que la personne puisse toujours en utiliser une pendant que l'autre est lavée.



Comment l'utiliser ?

L'attelle se glisse par la pointe dans la main fermée en commençant côté index. On tire sur la lchette de l'attelle jusqu'à ce qu'elle soit mise à la bonne position. Après on gonfle l'attelle Urias®-Johnstone à l'aide de la petite pompe afin d'atteindre l'épaisseur voulue. Pour gonfler, on utilise le côté transparent de la pompe. En utilisant la pompe à l'envers, c'est-à-dire côté noir, en la mettant dans le Petit tube, on fait ressortir l'air. L'attelle Parsnip est simple d'utilisation et peut donc être mise par un accompagnant ou un membre de la famille.

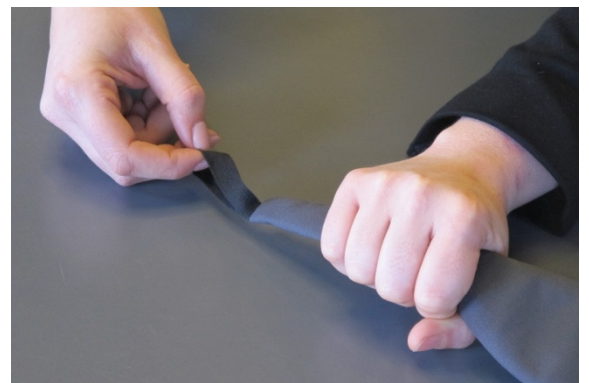

Entretien ?

L'attelle et la housse peuvent se laver à la main, en utilisant un savon doux et de l'eau tiède.

ADVYS est reconnu en tant que distributeur des attelles Urias®-Johnstone.

Pour voir la gamme complète, consultez www.advys.be

