

# Mode d'emploi Proflebo All-in



- Aide à l'enfilage et au retrait des bas à pointe ouverte et fermée
- Facile à l'utiliser
- Matériau robuste en durable
- Lavable à la main à 30 °C

MD



Composition de matériau:  
40D Polyester  
Coating: PU, Silicone

## Aide au retrait Proflebo All-in-1



1  
Faire glisser  
l'All-in-1 sur le  
bas



2  
Attacher  
l'élastique  
sur l'All-in-1  
autour de la  
cheville



3  
Fermer l'é-  
lastique avec  
une tension  
moyenne



4  
Replier le bas  
aussi loin que  
possible sur  
l'All-in-1



5  
Saisir votre  
bas et le retirer

## Aide à l'enfilage Proflebo All-in-1 (bas à pointe ouverte)

- 

1 Insérer le pied dans l'All-in-1
- 

2 Tirer le bas par-dessus l'All-in-1 jusqu'à ce qu'il soit juste au-dessus de la cheville
- 

3 Faire glisser le bas au bon endroit sur le talon et l'étendre jusqu'en dessous du genou
- 

4 Saisir la boucle noire de l'All-in-1 qui se trouve au niveau des orteils
- 

5 Tirer la boucle pour retirer l'All-in-1

## Aide à l'enfilage Proflebo All-in-1 (bas à

- 

1 Placer le pied comme indiqué et attacher l'élastique à mi-chemin de la jambe. La boucle noire se trouve en haut
- 

2 Placer le bas sur le pied
- 

3 Glisser le bas en place
- 

4 Retirer élastique
- 

5 Tirer sur la boucle noire pour retirer l'All-in-1 et ajuster le bas jusqu'en dessous du genou