

Handleiding Low Vision Design sprekend horloge

Tijd uit laten spreken.

Druk 1x de B4-knop, rechtsboven in.

Tijd instellen.

Druk 1x de mode B1-knop, linksboven in,

De tijdsweergave begint te knipperen.

U kunt nu instellingen wijzigen.

Wijzig de uurweergave d.m.v. de B3-knop, linksonder.

Wijzig de minutenweergave d.m.v. de B2-knop, rechtsonder.

Alarmtijd instellen.

Druk 2x de mode B1-knop in, stel de tijd in m.b.v. B3 - B2.

Alarm in-/uitschakelen.

In de reguliere stand, druk de B3-knop in, om het alarm in-/uit te schakelen.

(1x piep = alarm aan;

2x piep = herhaal alarm aan;

3x piep = alarm uit).

Tijdens het afgaan van het alarm kunt u -(de B1-knop indrukken om het herhaal alarm te stoppen. (De volgende dag zal het alarm weer afgaan). Of de B3-knop, om het alarm compleet te laten stoppen.

Automatische urenvermelding.

in de reguliere stand; druk de B2-knop in. Enkele korte piepjes achter elkaar indiceren dat de automatische urenvermelding aan staat.

Vervangen batterij.

Draai de 4 schroeven aan de achterzijde los.

Vervang voorzichtig de knoopcel batterij (type: CR2025 of CR2016).

Indien het display zwak wordt of het geluid minder, dient de knoopcel batterij vervangen te worden.

Plaats van de knoppen.

B1: Linksboven.

B2: Rechtsonder.

b3: Linksonder.

B4: Rechtsboven.

