


Dementieklok handleiding

Kenmerken:

- ✓ Niet-verkorte dag, periode van de dag, tijd en datum
- ✓ 5 verschillende alarmen en 3 verschillende medicatiemogelijkheden
- ✓ Automatisch dimmen of handmatig instellen van de helderheid van het scherm
- ✓ 3 verschillende displays: normaal display (zwart) + rood-wit-blauw display display + analoge klok display (als je wilt veranderen van display moe je op de afstandbediening de OK/ENTER knop ingedrukt houden voor een aantal seconden)
- ✓ 9 verschillende talen: Engels, Frans, Duits, Italiaans, Nederlands, Spaans, Portugees, Fins, Pools
- ✓ Fabrieksinstellingen reset

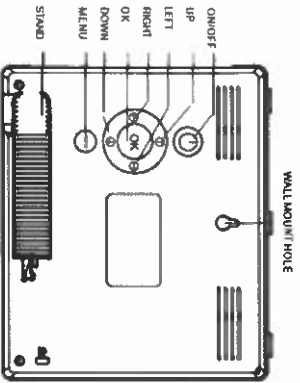

Instellingen:

Druk op de knop MENU om het menu weer te geven:

Opmerking: wijzigingen aan de regel kunnen alleen worden aangebracht als de cijfers zijn gemarkeerd en in een geel lettertype. Gebruik de Omhoog- of Omlaag-toets om de cijfers aan te passen. Druk op de knoppen LINKS of RECHTS om de cijfers te kiezen die u wilt aanpassen. Druk op OK om op te slaan en op MENU om af te sluiten.

Taal	<	Nederlands	>
Tijd	<	16:00	>
Dag	<	08-06-2020	>
Tijd (12 of 24-uur)	<	24-uur	>
Datum Mode	<	Day-Month-Year	>
Automatische helderheid	<	Aan	>
Volume	<	28	>
Alarm	<	>	>
Medicatie	<	>	>
Fabrieksinstellingen	<	V5.1	>

Lijn 1- Taal:
Ga naar de regel van Taal instellen, druk op UP of DOWN op de regel die u wilt wijzigen, druk op OK om naar de gewenste talen te wijzigen, druk op MENU om af te sluiten

Lijn 2- Tijd instellen:
Ga naar de regel van Tijd instellen, druk op "OK" om het uur van de minuut te onderstrepen, druk op OMHOOG van OMLAAG om aan te passen, druk vervolgens op "OK" om op te slaan en druk op MENU om af te sluiten.

Lijn 3 – Datum instellen:
Ga naar de regel van Datum instellen, druk op "OK" om de dag, datum of jaar te onderstrepen, druk op OMHOOG of OMLAAG om aan te passen, druk vervolgens op "OK" om op te slaan en druk op MENU om af te sluiten.

Lijn 4 – Tijd-modus:
Ga naar de regel van de tijdmodus, druk op OK om over te schakelen naar 12 uur van 24 uur naar keuze, druk op MENU om af te sluiten.

Lijn5 – Datum mode-<Dag-Maand-Jaar>of<Maand-Dag-jaar> of<Jaar-Maand-Dag>
Ga naar de regel van Datummodus, druk op OK om over te schakelen naar de gewenste datummodus, druk op MENU om af te sluiten.

Lijn6 – Automatisch dimmen
Ga naar de regel van automatisch dimmen, druk op OK om over te schakelen naar een van de vier modi (automatisch, uit, midden, laag) die u verkies, druk op MENU om af te sluiten.

Automatisch: Normale helderheid begint van 7:00 uur tot 19:59 uur, scherm gedimd tot lage helderheid van 20:00 uur tot 06:59 uur.
Uit: altijd aan normale helderheid

Lijn7 – Volume instelling:
Ga naar de regel van Volume Set, druk op OK om te schakel van 0 tot 30 van uw voorkeur, druk op MENU om af te sluite

Lijn8 – Alarm instelling:
Ga naar de regel van Alarm set, druk op OK voor de vijf gro-druk op UP of DOWN om de instellingen voor tijd, datum of MENU om af te sluiten.

Tijd: dezelfde bewerking als bij het instellen van de tijd
Datum: druk op OK om over te schakelen naar een van de v voorkeur, van maandag tot vrijdag / zaterdag tot zondag / Modus: druk op OK om te wisselen tussen één keer en herf

Lijn 9 – Medicatierinnering

Ga naar de regel van Medicatierinnering, druk op OK voor medicatie-herinneringsinstellingen, druk op OMHOOG of TJD, Status of Modus te kiezen. Druk op MENU om af te sluit

Tijd: dezelfde bewerking als bij het instellen van de tijd
Status: druk op OK om te schakelen tussen aan en uit
Modus: druk op OK om te wisselen tussen één keer en herf

Lijn 10 – Fabrieksinstellingen

Ga naar de regel van Fabrieks-reset, druk op OK om te rese fabrieksinstellingen of niet, druk op MENU om af te sluite

Periodes van de dag:
6:00-11:59 Ochttend
12:00-17:59 Middag
18:00-23:59 Avond
24:00-5:59 Nacht

Wat zit er in de doos:

- 1x dementieklok
- 1x SV2A power adapter
- 1x Handleiding