

sigvaris


ROLLY

AAN- EN UITTREKHULP VOOR COMPRESSIEKOUSEN

Geleverd in handige opberzak



Elastisch membraan gevuld met water

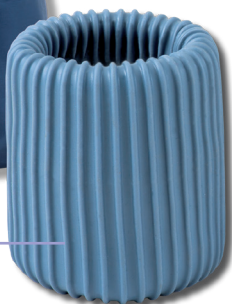

Effectief aan- en uittrekken

Nieuwe techniek, alleen te gebruiken of met hulp.

Herpositioneren v/d kous

Geribbeld oppervlak, laat toe de kous zonder beschadiging te positioneren. Ideaal voor het verwijderen van kleine plooien, het goed positioneren van de hiel, ...

Praktisch

Compact en vervormbaar, makkelijk mee te nemen, past in een reistas.

Onderhoudsvriendelijk

Afwasbaar met water en zeep. Eveneens mogelijk te reinigen met een ontsmettingsmiddel.

CONE

Hulpstuk om de compressiekous gemakkelijk op de Rolly te zetten.

Apart verkrijgbaar.



Bijzonder geschikt in geval van:

mobiliteitsverlies - artritis - artrose - verband, pleister -
ulcer - zwangerschap - overgewicht, obesitas - beperkte
flexibiliteit - het dragen van compressieklasse 3

Gebruiksaanwijzing ROLLY



1 Rol de kous over de arm uit. Goed aantrekken om plooiën te voorkomen.



2 Rol de Rolly tot aan het einde van de kous.




3 Neem het uiteinde van de kous en trek deze over de Rolly, door naar beneden te trekken. Breng de Rolly omhoog, zodat het uiteinde van de kous goed onder de Rolly komt te zitten.



4 Rol de Rolly tot aan het einde van de hand, zodat de kous oprolt.




5 Rol de kous op totdat u enkel nog de tip van de kous ziet (teengedeelte): dit gedeelte moet strak zitten.

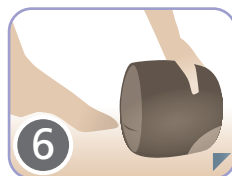

6 Plaats de tip van de kous tegen uw tenen. Let erop dat de hiel van de kous zich onderaan bevindt.



7 Stop uw voet in de Rolly en rol hem verder. Passeer de hiel en rol de Rolly verder uit over uw been tot aan het einde van de kous.

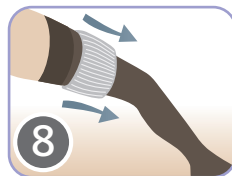

8 Verwijder de Rolly door hem terug over het been te rollen. Gebruik zijn geribbeld oppervlak om de kous goed te positioneren.

Samenstelling:

Vloeistof: water, vloeibare zeep, polyacrylamide, bactericide.

Membraan: SEBS, paraffineolie, kleurpigmenten.

Latexvrij.

Ontdek de Rolly bij uw Sigvaris verdeler:



SIGVARIS
GROUP