

Het byBES Breezi- assortiment van activiteitenstoelen

Gebruiksaanwijzing



B | E | S
HEALTHCARE

Supporting your need

BE_NL



Bes Healthcare Ltd

+44 (0) 117 966 6761

info@beshealthcare.net

www.beshealthcare.net

131 South Liberty Lane, Ashton Vale, Bristol, BS3 2SZ VK © 2025

byBES-001 Gebruiksaanwijzing V4 20250106 EN EOE



1.	Uitleg bij symbolen en opmerkingen op de labels	4
2.	Introductie	5
2.1	Beschrijving van hethulpmiddel	
3.	Klinische toepassingen	7
3.1	Indicaties	
3.2	Contra-indicaties	
3.3	Algemene waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en informatie	
4.	Belangrijke informatie	9
4.1	Beoogd gebruik	
4.2	Beoogde omgevingen	
5.	Montage en afstelling	9
5.1	De juiste hoogte en diepte van de zitplaat instellen	
5.2	De juiste hoogte en diepte van de voetplaat instellen	
5.3	De zitplaat en voetplaat afstellen	
5.3.1	Algemene informatie	
5.3.2	De diepte van de zitplaat en voetplaat afstellen	
5.3.3	De hoogte van de zitplaat en voetplaat afstellen	
6.	Accessoires voor de byBes Breezi-activiteitenstoelen	15
6.1	Accessoires voor een goede houding	
6.1.1	Bodypoint-positioneringsriem voor het bekken	
6.1.2	Zitkussens	
6.1.3	Lateraal dijkussen	
6.1.4	Rugcontourkussen	
6.1.5	Borstriem van het rugcontourkussen	
6.1.6	Vrijstaande borstriem	
6.1.7	Bodypoint-positioneringsharnas vooraan Harnas	
6.1.8	Hoog rugkussen	
6.1.9	Hoofdsteun	
6.1.9.1	Hoofdsteun voor het rugcontourkussen	
6.1.10	Mediaal kniekussen (Pommel)	
6.1.11	Enkelbevestigingsriemen van Bodypoint	
6.2	Algemene accessoires	
6.2.1	Zitkussen	
6.2.2	Rugleuningskussen	
6.2.3	Transfertrapje	
6.2.4	Stabiliserende ski's	
6.2.5	Tray	
6.2.6	Trayriemen	
6.2.7	Trayonderlegger	
6.2.8	Armsteunen	
6.3	Mobiliteitsaccessoires	
6.3.1	Laag mobiliteitsframe	
6.3.2	Ski's met zwenkwielen	
6.3.3	Millie Mova	
7.	Routinematige zorg, onderhoud, reiniging, desinfectie en verwijdering	25
7.1	Dagelijkse controles/onderhoud	
7.2	Routinematige reiniging	
7.2.1	Hergebruik voor meerdere patiënten/gebruikers (desinfectie)	
7.3	Recyclage en veilige verwijdering	
8.	Technische specificaties en aanvullende informatie	26
8.1	Technische specificaties	
8.2	Levensduur en houdbaarheid	
8.3	Fabrieksgarantie	

1. Uitleg bij symbolen en opmerkingen op de labels



CE-markering ter aanduiding van conformiteit met Verordening (EG) nr. 2017/745 inzake medische hulpmiddelen

UKCA-markering ter aanduiding van conformiteit met de UK Medical Device Regulation 2002 (SI 2002 nr. 618, zoals gewijzigd)

Waarschuwing/
Vorzorgsmaatregel

Fabrikant

Productiedatum

Catalogusnummer

Lotnummer

Geautoriseerde vertegenwoordiger in de Europese Gemeenschap/Europese Unie

Unieke identificatiecode van het hulpmiddel

Dit is een opmerking die de gebruiker waarschuwt voor het risico op ernstige letsels of ongewenste werkingen bij het gebruik of verkeerd gebruik van het hulpmiddel.

Dit is een opmerking die de gebruiker waarschuwt voor het risico op een probleem met het systeem door het gebruik of verkeerd gebruik ervan.



Serienummer

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing

Medisch hulpmiddel

Maximaal gewicht van de gebruiker

Voorbeeld unieke identificatiecode van het hulpmiddel:



(01) 012345678910111213

(11) 220416

(21) 88888888

Er is alles aan gedaan om te verzekeren dat de informatie in deze handleiding correct was op het moment van publicatie. Bes Healthcare Limited behoudt zich echter het recht voor om de specificaties van een product of accessoire zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen in overeenstemming met de beleidslijn inzake voortdurende productontwikkeling. De informatie is op aanvraag beschikbaar in alternatieve formaten.

2. Introductie

Bedankt voor uw aankoop van de byBes Breezi-activiteitenstoel. Lees deze gebruiksaanwijzing en bewaar dit document, zodat u het kunt raadplegen voor afstellingen en onderhoud.

Als u problemen ondervindt bij het gebruik van de byBes Breezi-activiteitenstoel, neem dan contact op met uw lokale leverancier of BES Healthcare via de contactgegevens op de achterkant van dit document.

Voor de toepassing van dit document:

- slaat de term 'Breezi-stoel' op alle modellen van activiteitenstoelen in het byBES Breezi-assortiment: de Teezi (kleine breedte), de Breezi (standaardbreedte) en de Breezi Max (grote breedte).
- wordt de persoon die in de stoel zal zitten, de 'gebruiker' genoemd.
- wordt elke primaire ondersteuner zoals een verzorger, ouder, leraar, enz. de 'verzorger' genoemd.

2.1 Beschrijving van het hulpmiddel

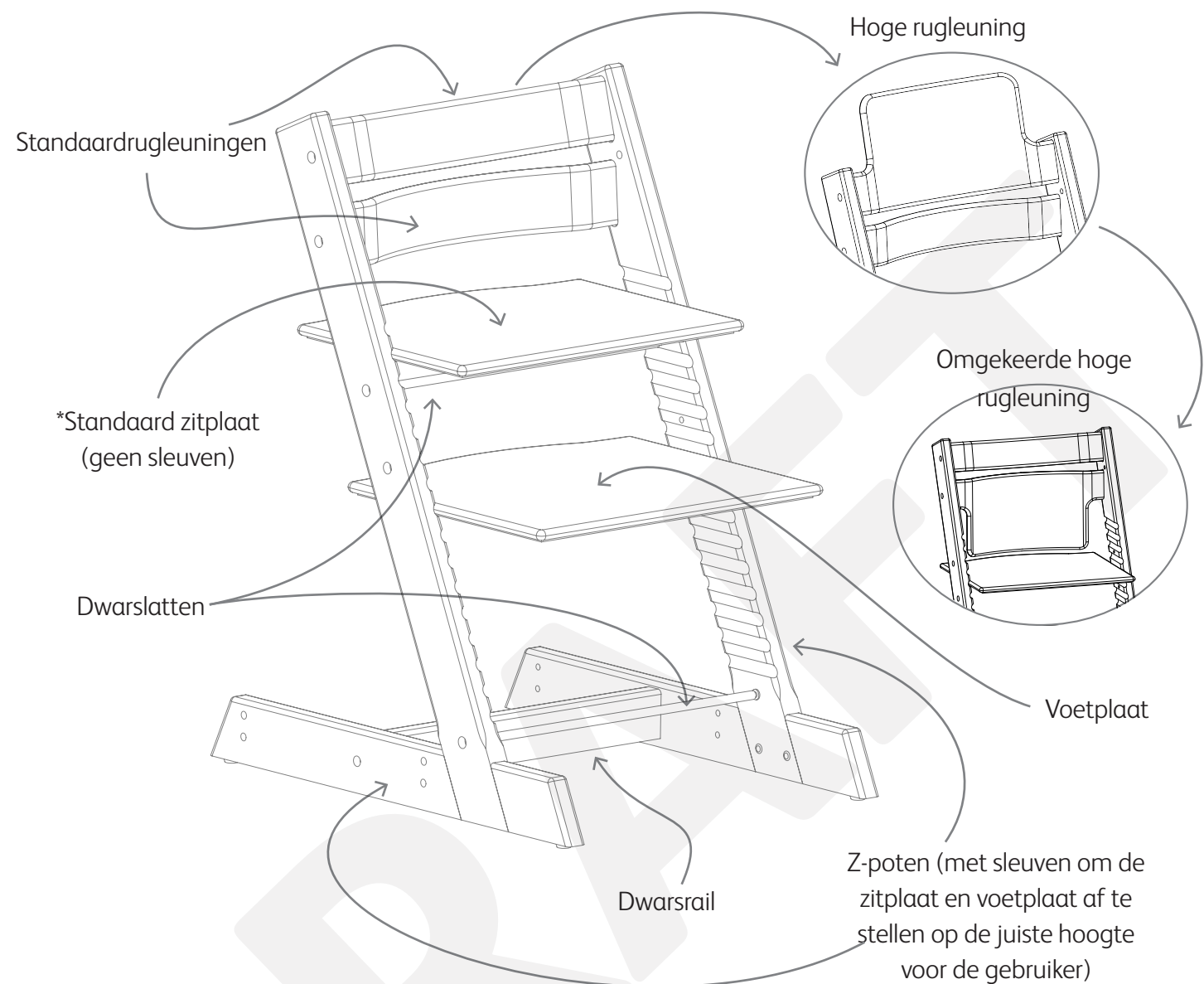
Het assortiment van byBES Breezi-activiteitenstoelen is de naam voor de medische hulpmiddelen die de variaties in stoelgrootte omvat, zoals hieronder beschreven in tabel 1.

Tabel 1. Beschrijving van het assortiment byBES Breezi-activiteitenstoelen

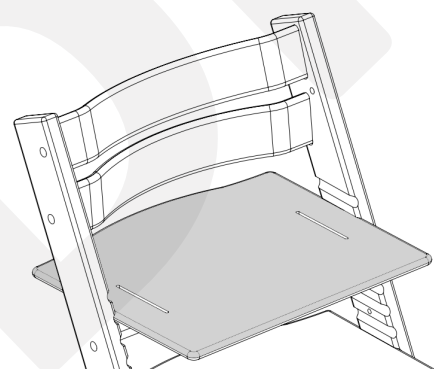
Productnaam van het hulpmiddel	Grootte	Gewicht (kg)	Afmetingen van de stoel	Maximaal gewicht van de gebruiker (kg)
Teezi-activiteitenstoel	Klein	7 kg	Hoogte 65 cm; breedte 42 cm	65 kg
Breezi-activiteitenstoel	Medium	8 kg	Hoogte 77 cm; breedte 46 cm	75 kg
Breezi Max-activiteitenstoel	Groot	11 kg	Hoogte 93 cm; breedte 51 cm	85 kg

De solide onderdelen van de Breezi-stoel zijn vervaardigd uit een combinatie van beukenmultiplex, beukenlaminaatmultiplex en berkenmultiplex. De accessoires van de Breezi-stoel zijn vervaardigd uit deze materialen en bekleed met Ultraleather-bekleding over een schuimvoering.

Afbeelding 1. Een Breezi-stoel met de belangrijkste stoeloncerdelen gelabeld.

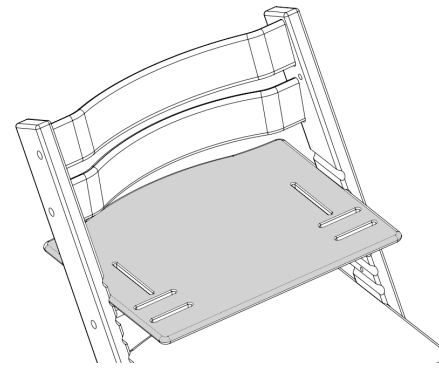


*Alternatieve opties voor zitplaten:



Plaat met enkele sleuf

Met een paar parallelle sleuven voor het monteren van een positioneringsriem voor het bekken (zie sectie 6.1.1).



Plaat met dubbele sleuf

Met een extra paar sleuven (loodrecht op de enkele sleuven) voor het monteren van de laterale dijkussens (zie sectie 6.1.3).

OPMERKING: De diepte van de platen gespecificeerd in sectie 8.1 komt niet noodzakelijk overeen met de effectieve diepte van de plaat wanneer deze in gebruik is. Dit is afhankelijk van de positionering van de plaat ten opzichte van het lichaam van de gebruiker en van de accessoires die worden gebruikt.

3. Klinische toepassingen

3.1 Indicaties

De Breezi-stoel en de accessoires van de Breezi-stoel zijn geïndiceerd om ondersteuning te bieden aan personen met extra zitbehoeften die meer ondersteuning vereisen dan de ondersteuning die conventionele zitmiddelen kunnen bieden.

De keuze of voorschrift voor de stoel en eventuele accessoires moet gebaseerd zijn op een holistische evaluatie van de individuele zitbehoeften van de gebruiker.

De Breezi-stoel biedt bepaalde ondersteuningselementen voor een persoon. Alle andere aspecten van zorg moeten worden overwogen door de clinicus/klinisch team die verantwoordelijk zijn voor het individuele zorg- of het ondersteuningspakket van de gebruiker.

3.2 Contra-indicaties

De Breezi-stoel is bedoeld om extra ondersteuning voor een goede houding te bieden om tegemoet te komen aan de milde tot matige zitbehoeften van de gebruiker, ongeacht de aandoening, ziekte of diagnose. Het gebruik van de Breezi-stoel is gebaseerd op de ernst van de aandoening van de gebruiker en diens mogelijkheden: daarom zijn er geen ziekte- of aandoeningsspecifieke contra-indicaties voor de stoel.

Met het oog op het bovenstaande stelt BES Healthcare de volgende contra-indicaties:

- De Breezi-stoel is gecontra-indiceerd voor gebruikers van wie de ondersteuningsbehoeften voor een goede houding niet voldoende kunnen worden vervuld door de positionele steunen die geboden worden door het assortiment van accessoires.
- De Breezi-stoel is gecontra-indiceerd voor gebruikers van wie het gedrag het risico inhoudt dat ze zichzelf verwonden terwijl ze in de stoel zitten, bijvoorbeeld bij sterke neigingen om te schommelen of te wiegen, waardoor er een risico bestaat dat de stoel omkantelt tijdens het gebruik.

3.3 Algemene waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen, en informatie

- Volg de instructies van de fabrikant met betrekking tot zowel de stoel als de eventuele meegeleverde accessoires. Als de instructies niet gevolgd worden, kan dit de gebruiker in gevaar brengen of de functionaliteit en voordelen van de stoel beperken.
- De Breezi-stoel is ontworpen om bestand te zijn tegen 'normaal' gebruik en zorg binnenshuis, wat ook wil zeggen dat hij niet is ontworpen om bestand te zijn tegen extreme hitte of kou of tegen extreme luchtvochtigheid.
- Alleen personen die een training gekregen hebben over de Breezi-stoel, mogen wijzigingen aanbrengen aan de stoel of de accessoires.
- De accessoires van de Breezi-stoel zijn niet geschikt voor gebruik op andere stoelen of zitsystemen zonder de goedkeuring van de fabrikant van de accessoires.
- Controleer alle bouten 2-3 weken na het eerste gebruik van de stoel en draai ze opnieuw vast. Daarna moet u de bouten regelmatig controleren en opnieuw aandraaien, indien nodig.
- Berg de stoel op de juiste manier op wanneer hij niet in gebruik is en vermijd extreme temperaturen en luchtvochtigheid.
- Gebruik de accessoirespecifieke bevestigingskits die door BES Healthcare zijn geleverd en volg de handleidingen en video's 'Hoe te monteren' die beschikbaar zijn op de website van BES Healthcare www.beshealthcare.net, om te verzekeren dat de accessoires correct worden geïnstalleerd.



Voorzorgsmaatregelen

- Gebruik **GEEN** accessoires of vervangingsonderdelen die niet van Breezi zijn, tenzij toegestaan door BES Healthcare, aangezien deze de veiligheid van de gebruiker in gevaar kunnen brengen.
- Met het oog op de veiligheid van de gebruiker moet elke geleverde riem of harnas altijd correct gemonteerd en gebruikt worden (de meeste letsels door hoge stoelen worden veroorzaakt door vallen).
- Verzekert dat de positionering van de stoel de gebruiker niet blootstelt aan bijkomende risico's, zoals verstikking door kleine voorwerpen, brandwonden door hete oppervlakken/vloeistoffen, wurging door raambekledingssnoeren/elektrische snoeren en andere letsels door andere potentiële risico's.
- Gebruik de stoel **NIET** als opstapje of krukje.
- Gebruik de Breezi-stoel **NIET** als een onderdeel ervan kapot, gescheurd of zichtbaar beschadigd is, of als er een onderdeel ontbreekt of niet correct werkt. Neem onmiddellijk contact op met uw lokale leverancier of BES Healthcare via de contactgegevens op de achterkant van dit document, als er een van de vermelde foutelementen wordt waargenomen.
- De Breezi-stoel is een medisch hulpmiddel, geen speelgoed. Laat kinderen niet met de stoel spelen en gebruik hem niet voor andere doeleinden dan die aanbevolen door BES Healthcare.
- Wanneer de stoelplaten met dubbele sleuven gebruikt worden, moet u er rekening mee houden dat de vingers van de gebruiker in de sleuven gekneld kunnen raken.



Waarschuwingen

- Laat de gebruiker van het zitsysteem **NIET** zonder toezicht, wanneer de stoel gebruikt wordt.
- Gebruik de stoel uitsluitend, als alle onderdelen juist gemonteerd en afgesteld zijn. Besteed speciale aandacht aan de zitplaat en voetplaat. Volg de instructies in sectie 5 van dit document om te verzekeren dat ze goed zijn bevestigd en afgesteld, voordat de stoel gebruikt wordt.
- Plaats de stoel niet in de buurt van open vuur of andere belangrijke warmtebronnen zoals gashaarden, elektrische vuurtjes, houtkachels, enz., wegens het risico op brand.
- Als de stoel naast vaste structuren of ander meubilair is geplaatst, moet er verzekerd worden dat de gebruiker de benen niet kan gebruiken om de stoel naar achteren te duwen, wat mogelijk kan leiden tot omkantelen.
- Plaats de Breezi-stoel altijd op een vlakke stabiele ondergrond en op het vloerniveau, idealiter met ruimte erachter, zodat de stoel bijvoorbeeld van een tafel kan weggeschoven worden. Plaats de stoel **NOOIT** op een structuur, tafel of oppervlak boven het vloerniveau.
- Bepaalde types vloeren (bijv. gepolijste tegels, houten vloeren, laminaat, linoleum) kunnen gevoelig zijn voor slijtage wanneer de Breezi-stoel verschoven wordt. Het is de verantwoordelijkheid van de verzorger om te beslissen of de stoel al dan niet geschikt/compatibel is met de vloer.
- Het product bevat kleine onderdelen die als ze los zitten, kunnen ingeslikt worden en zo leiden tot verstikking.
- Zoals bij elk nieuw zithulpmiddel, kan dit product de manier waarop een persoon zit, veranderen. De gebruiker moet regelmatig drukontlastende activiteiten en huidintegriteitscontroles blijven uitvoeren, niet alleen op plaatsen waar de gebruiker in contact komt met het product, maar ook op primaire drukdragende plekken, zoals het heiligbeen, de benen en de billen. Als er een verhoogde aanhoudende roodheid of irritatie van de huid optreedt, stop dan met het gebruik en raadpleeg uw klinische specialist of zitspecialist. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot ernstige letsels, zoals decubitus.
- Als er zich een ernstig incident voordoet met betrekking tot het gebruik van dit product, moet dit worden gemeld aan de fabrikant en de lokale bevoegde autoriteit.

4. Belangrijke informatie

4.1 Beoogd gebruik

De Breezi-stoel, met de optionele Breezi-stoelaccessoires, is ontworpen voor gebruikers met extra zitbehoeften, die meer ondersteuning vereisen dan de ondersteuning die conventionele zitmiddelen kunnen bieden. De Breezi-stoel kan worden aangepast om een optimale positionering te bieden voor dagelijkse activiteiten en om personen waar nodig extra positioneringsondersteuning te bieden om te helpen bij het uitvoeren van die activiteiten.

4.2 Beoogde omgeving

De Breezi-stoel is ontworpen voor gebruik in onderwijs- en zorginstellingen en in een normale thuisomgeving.

5. Montage en afstelling

Wanneer de Breezi-stoel gemonteerd geleverd wordt, is hij onmiddellijk klaar voor gebruik, als de montage gebaseerd is op een voorafgaande evaluatie van de gebruiker, maar is het mogelijk dat de diepte van de platen nog moet worden afgesteld (zie 5.1 en 5.2). Als de gebruiker gegroeid is, of het gebruik van de stoel veranderd is na een evaluatie, dan zijn er mogelijk aanpassingen aan de afstelling van de stoel nodig. Het is aanbevolen om voorafgaand aan het eerste gebruik alle bouten op de stoel te controleren om te verzekeren dat er tijdens het transport geen bouten zijn losgeraakt. Draai indien nodig losse bouten vast voor het eerste gebruik.

Wanneer de Breezi-stoel in een plat pakket wordt geleverd, zal het nodig zijn om hem uit de samenstellende delen op te bouwen. Raadpleeg de handleiding 'Hoe op te bouwen' voor volledige instructies over het opbouwen van de stoel uit een plat pakket.

Van tijd tot tijd kan het nodig zijn om de stoel aan te passen aan de groei van de gebruiker of aan veranderende behoeften, zoals gebruik aan verschillende tafelhoogtes. De juiste instelling van de zit- en voetplaten en eenvoudige aanpassingen aan de zit- en voetplaten, zoals het van voren naar achteren schuiven van de platen in het frame of het aanpassen van de hoogte van de platen, worden behandeld in de secties 5.1, 5.2 en 5.3 van dit document.

Er is een assortiment accessoires voor de Breezi-stoel beschikbaar om de gebruiker van de stoel te ondersteunen. Deze accessoires staan vermeld in sectie 6. De behoefte aan accessoires om de gebruiker te ondersteunen en om te helpen voldoen aan de vereisten voor een goede houding tijdens het zitten, moet worden besproken met het klinische team of zorgteam dat verantwoordelijk is voor de zorg van de gebruiker. Zodra de juiste accessoires zijn bepaald, kunnen ze worden besteld door contact op te nemen met uw lokale leverancier of BES Healthcare via de contactgegevens op de achterkant van dit document.

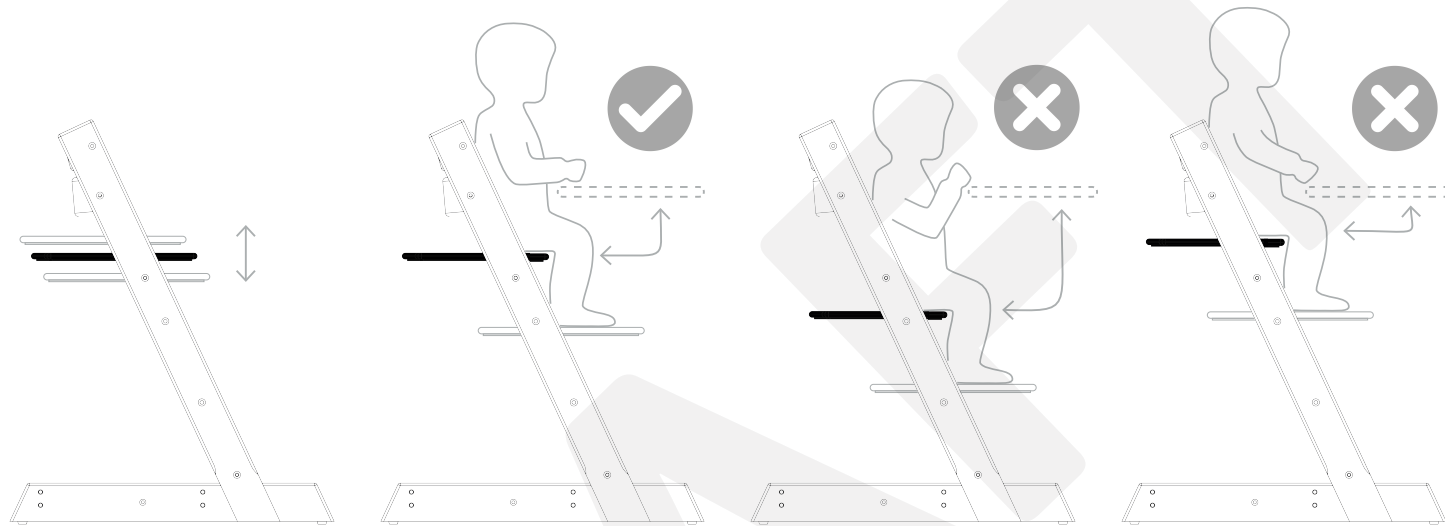
OPMERKING: het is aanbevolen de bevestiging, verwijdering of afstelling van de accessoires van de Breezi-stoel te laten uitvoeren door een getraind persoon.

Meer hulp en de video-instructies 'Hoe te monteren' voor de accessoires van de Breezi-stoel zijn verkrijgbaar op de Breezi-pagina's van de website van BES Healthcare www.beshealthcare.net



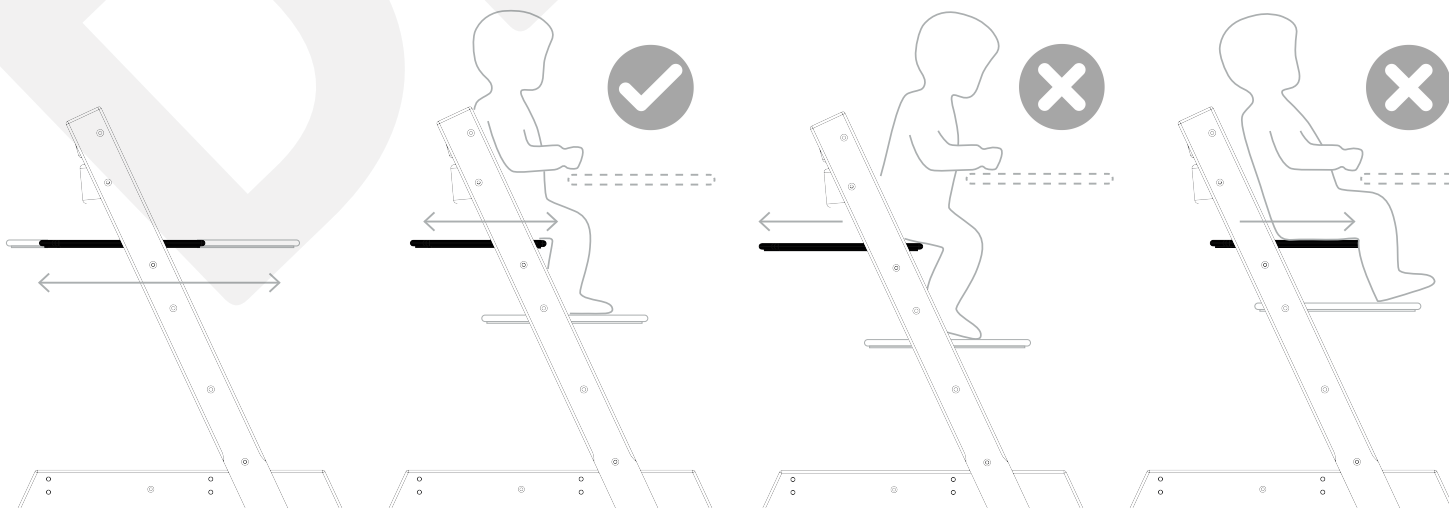
5.1 De juiste hoogte en diepte van de voetplaat instellen

HOOGTE VAN DE ZITPLAAT - De zitplaat heeft de juiste hoogte wanneer de ellebogen van de gebruiker op gelijke hoogte zijn met het oppervlak dat gebruikt wordt (zie afb. 2).



Afbeelding 2. De juiste hoogte van de zitplaat instellen.

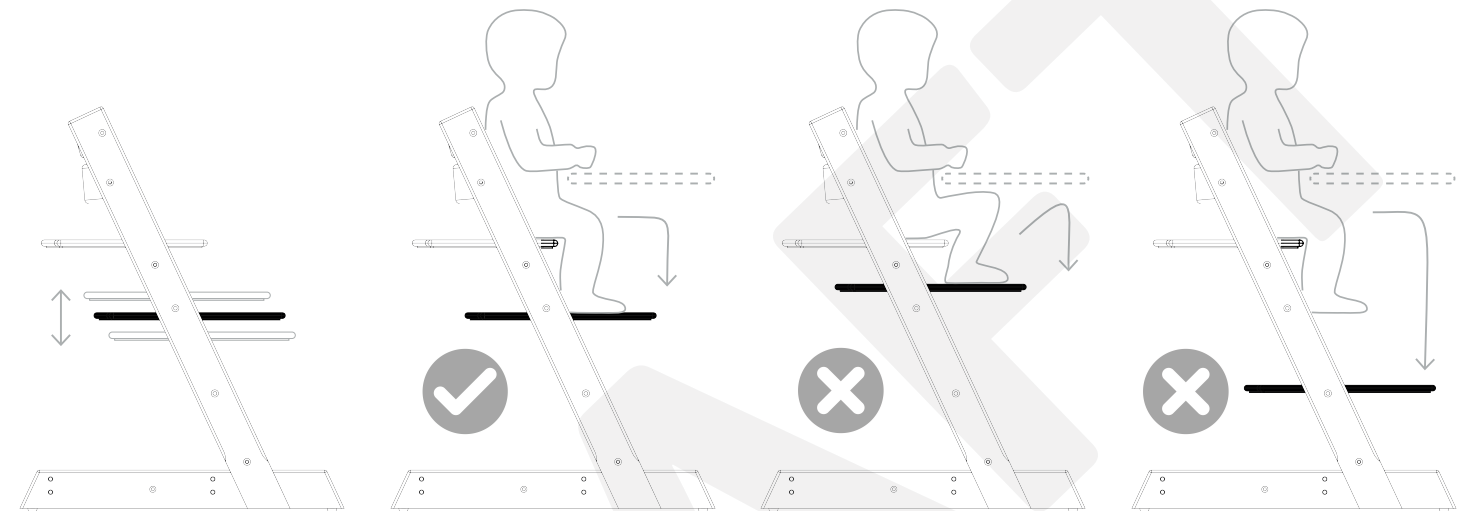
DIEPTE VAN DE ZITPLAAT - Plaats de rug van de gebruiker tegen de rugleuningen. De zitplaat moet 75 % van de dijen ondersteunen (zie afb. 3). Het is belangrijk dat de zitdiepte niet te diep is, zodat de gebruiker comfortabel zit en natuurlijke bewegingen kan maken.



Afbeelding 3. De juiste diepte van de zitplaat instellen.

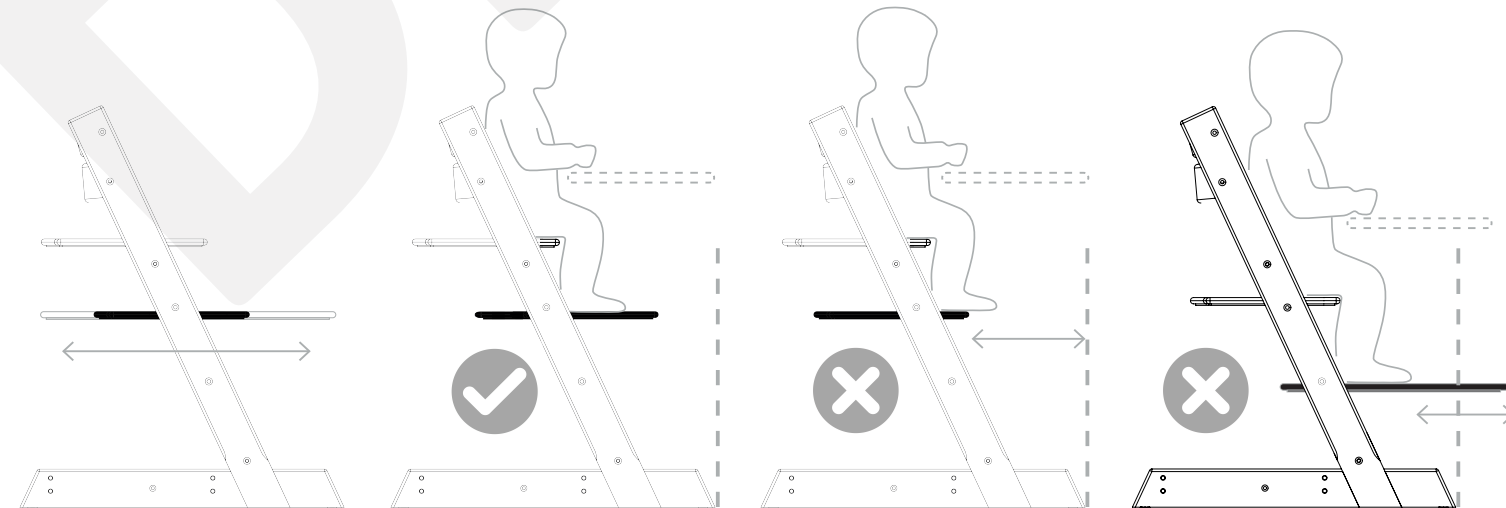
5.2 De juiste hoogte en diepte van de voetplaat instellen

HOOGTE VAN DE VOETPLAAT - De voetplaat heeft de juiste hoogte wanneer de achterkant van de dij op de zitplaat rust en de voetzolen plat op de voetplaat rusten (zie afb. 4).



Afbeelding 4. De juiste hoogte van de voetplaat instellen.

DIEPTE VAN DE VOETPLAAT - Zorg ervoor dat de tenen niet voorbij de voorste rand van de voetplaat uitsteken en dat de voetplaat NOOIT uitsteekt over de voorkant van de stoelpoten op vloerniveau (zie afb. 5).



Afbeelding 5. De juiste diepte van de voetplaat instellen.

OPMERKING: het is aanbevolen de Breezi-accessoires te laten bevestigen, verwijderen of afstellen door een getraind persoon.

Meer hulp en de video-instructies 'Hoe te monteren' voor de Breezi-accessoires zijn beschikbaar op de Breezi-pagina's van de website van BES Healthcare www.beshealthcare.net.



5.3 De zitplaat en voetplaat afstellen

Van tijd tot tijd kan het nodig zijn om de stoel aan te passen aan de groei van de gebruiker of aan veranderende behoeften.

In de instructies in deze sectie wordt er uitgelegd hoe u basisaanpassingen aan de zitplaat en voetplaat kunt uitvoeren, zoals het naar voren of naar achteren schuiven van de platen in het frame of het aanpassen van de hoogte van de platen om aan de behoeften van de gebruiker te voldoen.

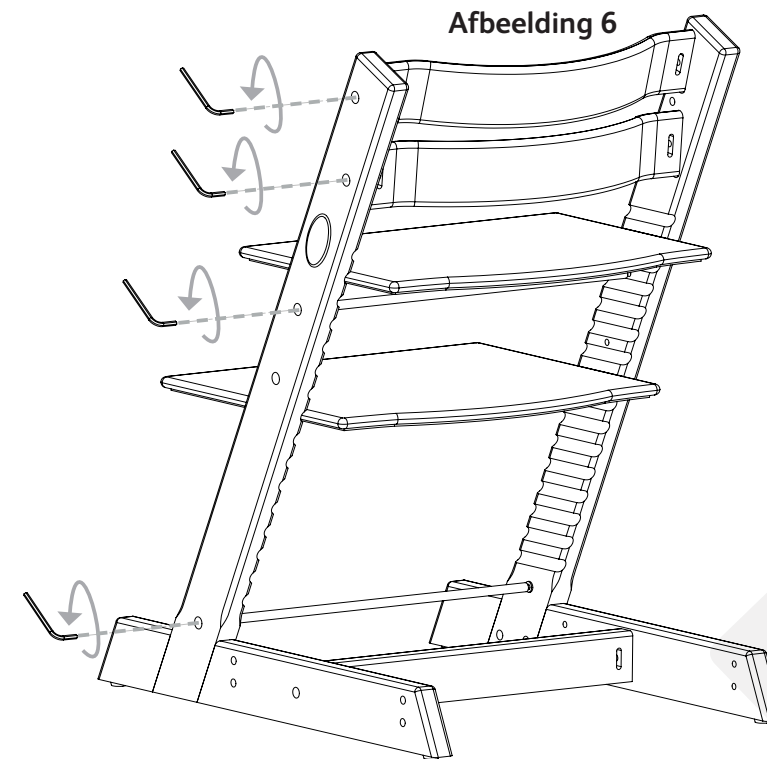
OPMERKING: Houd er bij het afstellen van de zitplaat en voetplaat

- rekening mee dat door de impact van de zitdiepte en zithoogte ten opzichte van de onderrugleuning sommige posities niet compatibel zijn.
- Verzekert dat alle bouten van de Z-poten vastgedraaid zijn, zodat de platen stevig vastzitten voordat de gebruiker op de stoel plaatsneemt.
- Verzekert dat de voorkant van de plaat niet verder naar voren uitsteekt dan de voetafdruk van de stoelpoten.
- Positioneer de plaat zodanig dat ze goed geplaatst is voor de gebruiker en voor het beoogde gebruik, zoals beschreven in de secties 3 en 4 hierboven.

5.3.1 Algemene informatie

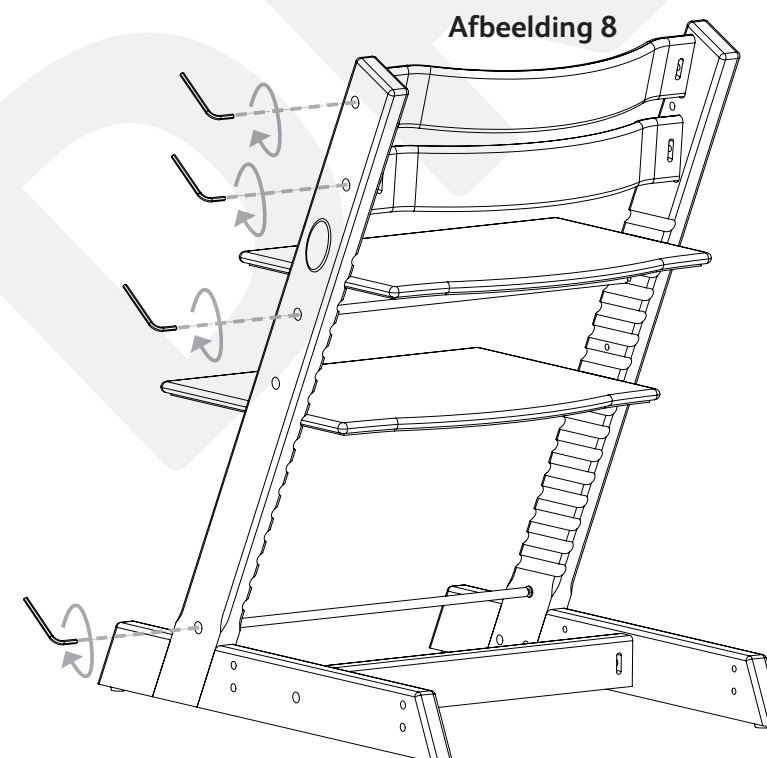
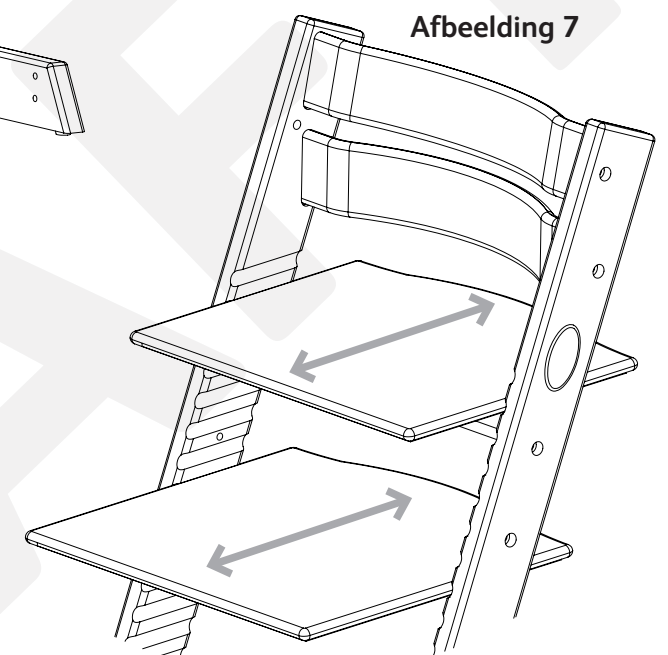
U kan de zitplaat en voetplaat op een eenvoudige manier afstellen door een inbussleutel van 4 mm te gebruiken om de bouten linksom te draaien om ze los te maken (waardoor de platen binnen het frame kunnen bewegen) (afbeelding 6) en rechtsom om de bouten vast te draaien (afbeelding 8), na de afstelling van de plaat (afbeelding 7).

OPMERKING: Zorg ervoor dat u de bouten niet te strak aandraait.



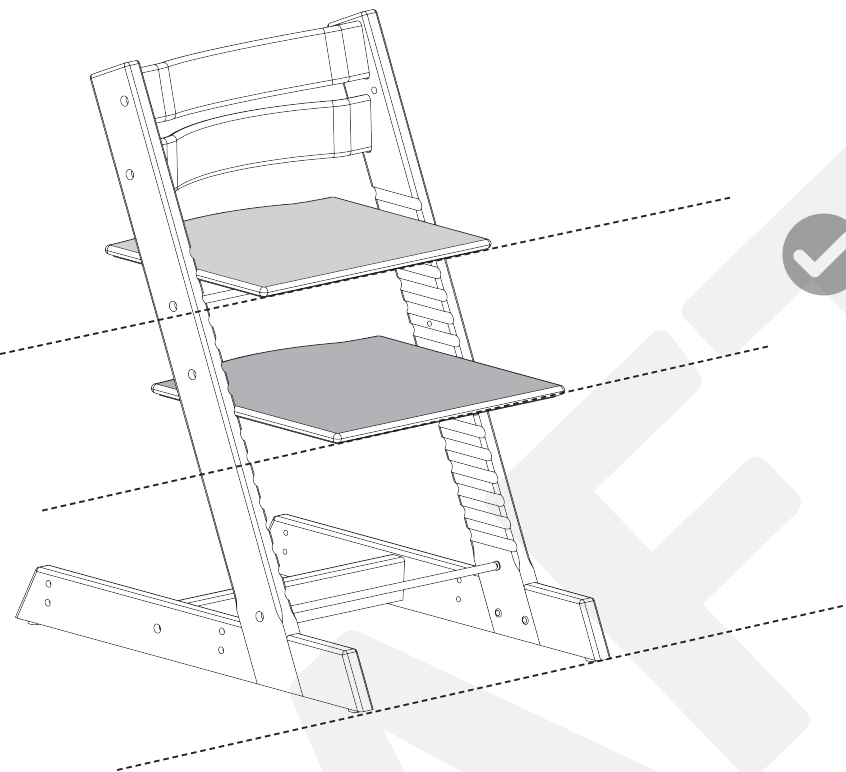
Draai met behulp van de inbussleutel de bouten in de twee rugleuning en de twee dwarslatten aan één kant van de stoel los (zie afb. 6) totdat de plaat kan schuiven.

Stel de platen indien nodig af, zoals weergegeven op afb. 7



Draai alle vier de bouten aan één kant van de stoel weer vast (twee in de rugleuning en twee in de dwarslatten), zoals weergegeven op afb. 8.

5.3.2 De diepte van de zitplaat en voetplaat afstellen



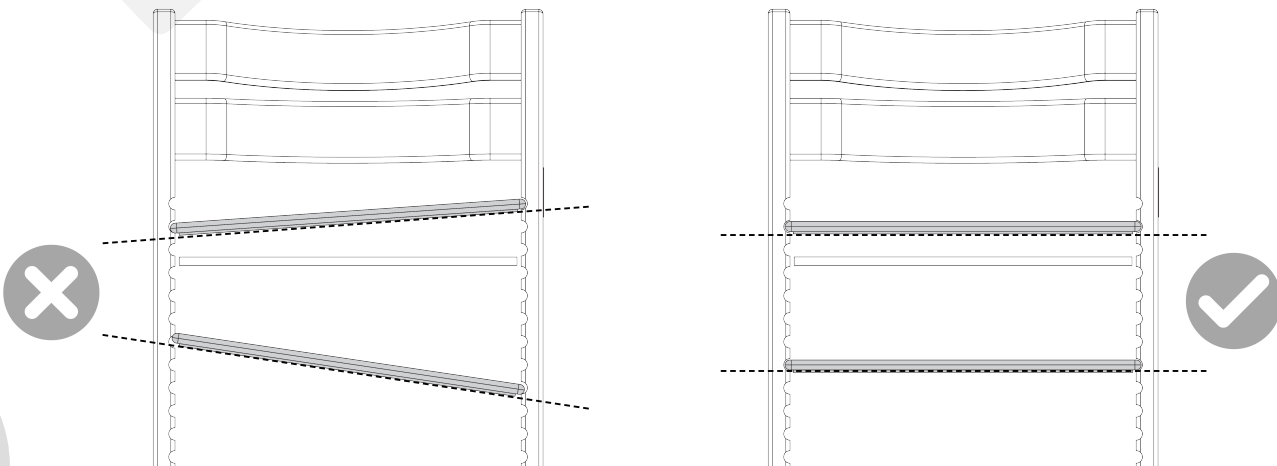
Afbeelding 9. Controleer na elke afstelling of de platen loodrecht liggen op de voorkant van de stoel.

5.3.2 De hoogte van de zitplaat en voetplaat afstellen

Draai de bouten los zoals beschreven in 5.3.1. Schuif de zitplaat en/of voetplaat uit het frame en leg de plaat hoger of lager door de juiste sleuven op de Z-poten te selecteren. Schuif de plaat in de geselecteerde sleuven. Draai zodra u de juiste plaathoogte hebt bereikt, de bouten vast zoals beschreven in 5.3.1 om de platen op hun plaats te houden.

OPMERKING: verzeker dat de platen loodrecht op de poten liggen (zie afb. 9) en horizontaal (d.w.z. in dezelfde sleuf in elke Z-poot), en niet 'scheef' of onder een hoek na afstelling (zoals beschreven op afb. 10).

Afbeelding 10. Controleer na elke afstelling of de platen horizontaal liggen en geen hoek vormen.



6. Accessoires voor de byBes Breezi-activiteitenstoel

BES Healthcare biedt een assortiment accessoires voor de Breezi-stoel die specifiek bedoeld zijn voor gebruik met het hulpmiddel ter ondersteuning van het beoogde gebruik zoals beschreven in sectie 4.1 van dit document. De accessoires van de Breezi-stoel zijn niet geschikt voor gebruik op andere stoelen of zitsystemen zonder de goedkeuring van de fabrikant.

De accessoires die beschikbaar zijn voor de Breezi-stoel zijn gegroepeerd in 'Accessoires voor een goede houding', 'Algemene accessoires' en 'Mobiliteitsaccessoires'. Ze worden hieronder opgesomd en samengevat in respectievelijk de secties 6.1, 6.2 en 6.3.

Voordat u een accessoire op uw Breezi-stoel monteert, moet u verzekeren dat u de secties in dit document hebt gelezen: 3.1 Indicaties; 3.2 Contra-indicaties; 3.3 Algemene waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en informatie; 4.1 Beoogd gebruik; 4.2 Beoogde omgevingen; 7 Zorg, onderhoud, reiniging, desinfectie en verwijdering; en 8 Aanvullende informatie: Service en fabrieksgarantie.

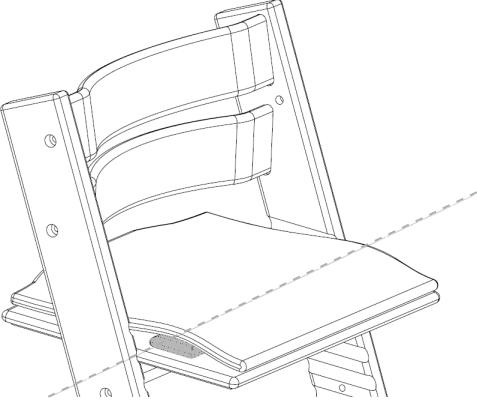
OPMERKING: het is aanbevolen de accessoires van de Breezi-stoel te laten bevestigen, verwijderen of af te stellen door een getraind persoon.

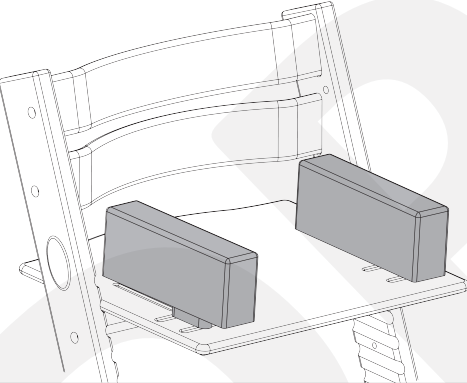
Gebruik de accessoirespecifieke bevestigingskits die door BES Healthcare zijn geleverd en volg de accessoirespecifieke handleidingen en video's 'Hoe te monteren' die beschikbaar zijn op de website van BES Healthcare www.beshealthcare.net, om te verzekeren dat de accessoires correct worden geïnstalleerd.

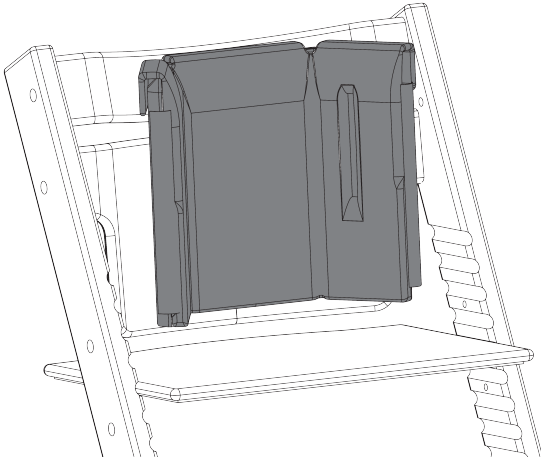


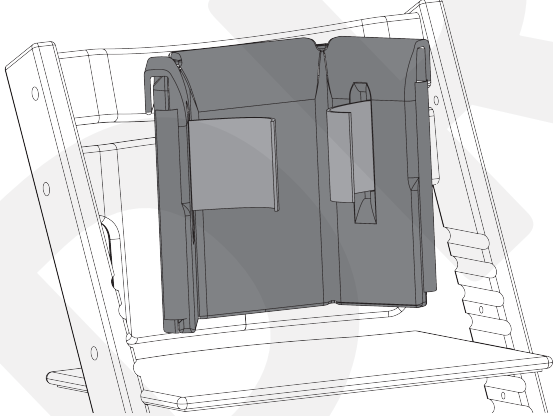
6.1 Accessoires voor een goede houding

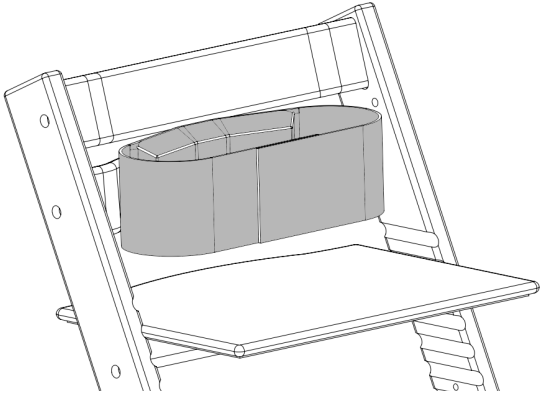
6.1.1 Bodypoint™-positioneringsriem voor het bekken	Omschrijving
	Beoogd gebruik: een positioneringsgordel voor het bekken is bedoeld om het bekken van de gebruiker in een stabiele positie te helpen plaatsen en om te voorkomen dat de gebruiker naar voren schuift op de zitplaat. Zo worden een goede houding en functionele zitpositie behouden. Toepassing: deze gordel moet worden gemonteerd met behulp van de bevestigingskit die onder een gegroefde zitplaat wordt bevestigd. De band wordt vervolgens door de sleuven naar boven gestoken. Stijlen en maten: De Bodypoint-positioneringsriemen voor het bekken zijn verkrijgbaar met een keuze uit gespen (zijdelingse ontgrendeling (enkele en dubbele trekbeweging), drukknop, draaiknop, Rehab-vergrendeling), bandbreedtes (25, 38 of 50 mm) en lengtes van de vulling (320 tot 920 mm).
⚠ Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen ⚠	
- Dit product mag alleen worden gebruikt voor het positioneren van een persoon in een stoel. Het is NIET bedoeld voor gebruik als een transportveiligheidsvoorziening, als een persoonlijk beveiligingssysteem of voor een andere toepassing waar fouten kunnen leiden tot letsels. Verkeerd gebruik van dit product is niet toegestaan en onveilig. - Deze positioneringsriem voor het bekken moet te allen tijde strak over de dijen worden gedragen. Laat uw zitspecialist de juiste afstelling en het juiste gebruik demonstreren. - Een losse riem kan ertoe leiden dat de gebruiker omlaag glijdt en kan een risico op wurging inhouden. - Als deze positioneringsriem voor het bekken per ongeluk wordt losgemaakt, kan dit ertoe leiden dat de gebruiker omlaag glijdt of van de stoel valt. - Als de gebruiker zichzelf niet kan losmaken, kan dit gevaarlijk zijn wanneer de gebruiker omlaag glijdt of tijdens een noodgeval vast komt te zitten in de stoel. - Als de fysieke of cognitieve capaciteiten van de gebruiker hem/haar verhinderen om de riem veilig te bedienen, moet er te allen tijde een verzorger aanwezig zijn tijdens het gebruik ervan. - Verzekert dat alle verzorgers weten hoe ze het product correct moeten vast- en losmaken.	

6.1.2 Zitwigkussen	Omschrijving
	Een dun kussen om vóór het bekken onder een zitkussen te plaatsen. Beoogd gebruik: een zitwigkussen helpt voorwaartse bewegingen van de heupen te verminderen en vermindert daardoor ook de voorwaartse kanteling van het bekken. Toepassing: het kussen wordt met klittenband vóór de positioneringsgordel van het bekken bevestigd aan de zitplaat, indien aanwezig, en anders net vóór de middellijn op de zitplaat en onder het zitkussen (6.2.1). Maten: breedtes die overeenkomen met de zitkussens die worden gebruikt.
⚠ Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen ⚠ - Het zitwigkussen is NIET bedoeld om het risico op drukgerelateerde weefselletsels voor de gebruiker te verminderen. - Het zitwigkussen is bedoeld om de neiging om naar voren te glijden te verminderen, maar kan dit niet volledig voorkomen (hiervoor moet er een correct gepositioneerde positioneringsriem voor het bekken (6.1.1) worden gebruikt). - Moet onder een zitkussen worden geplaatst (6.2.1), niet erop.	

6.1.3 Lateraal dijkussen	Omschrijving
	Gewatteerde blok die aan de zitplaat wordt bevestigd voor extra ondersteuning. Beoogd gebruik: de laterale dijkussens bieden laterale ondersteuning langs de buitenkant van de dijen om het bekken, de dijen en de knieën te helpen positioneren. Toepassing: bevestig aan een zitplaat met dubbele sleuf door middel van bouten door de voorgesneden sleuven. Een verstelling in de laterale breedte van 60 mm aan elke kant is mogelijk door het kussen langs de dubbele sleuven te verplaatsen, zodat het nog steeds goed past, ook na groei. U kunt de hoek aanpassen door het kussen in de gewenste hoek te draaien, voordat u de bevestigingsbouten vastdraait. Maten: kort (150x90 mm); lang (220x90 mm)
⚠ Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen ⚠ - Gebruik GEEN laterale dijkussens om de gebruiker in een specifieke houding te dwingen of vast te houden. - De laterale dijkussens mogen alleen worden gemonteerd op stoelplaten met sleuven die vooraf uitgesneden zijn door de fabrikant - Ze mogen alleen worden gebruikt met 'halvebreedtekussens (HC)' (6.2.1). - Er zijn enkele gevallen waarin laterale dijkussens niet samen met een rugcontourkussen of een kleine zitdiepte kunnen worden voorgeschreven, omdat het ene kan voorkomen dat het andere zoals gewenst wordt gepositioneerd. - Laterale dijkussens zijn niet ontworpen om te worden gebruikt als handgrepen voor het manoeuvreren van de stoel, voor het afstellen van de zitplaat of voor het betreden of verlaten van de stoel. - De laterale dijkussens zijn niet ontworpen om hoge krachten te weerstaan, bijvoorbeeld bij gebruikers met gespannen spieren (d.w.z. hoge tonus). - Verzekert dat de bouten altijd goed vastgedraaid zijn. - Lange versies van de laterale dijkussens kunnen achter de voorkant van de zitplaat worden gemonteerd om als laterale kniekussens te fungeren. - Als de bekleding na intensief gebruik de randen van het interne houten blok niet meer bedekt, moet het kussen vervangen worden om letsels te voorkomen.	

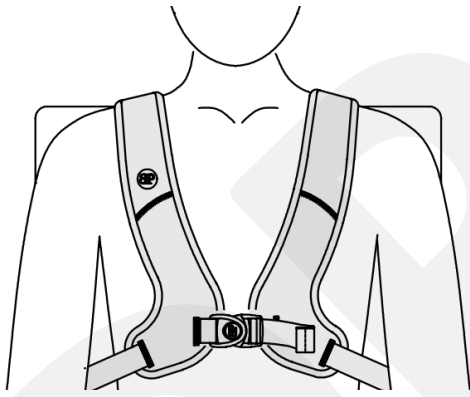
6.1.4 Rugcontourkussen	Omschrijving
	Een gewatteerde overlay met een ondersteunende houten structuur. Beoogd gebruik: het rugcontourkussen biedt laterale ondersteuning aan de romp, helpt de bovenromp op zijn plaats te houden en vermindert de neiging om naar één kant te leunen of in elkaar te zakken. Toepassing: het rugcontourkussen wordt in de rugleuningen geschroefd. Het rugcontourkussen kan omhoog en omlaag (met 160 tot 230 mm) op de gewenste hoogte worden versteld. Er zijn sleuven in de laterale secties waardoor de optionele borstriem (6.1.5) kan worden gestoken. Er kan een hoofdsteen als extra accessoire worden toegevoegd (6.1.9). Maten: (breedte achterplaat x lengte achterplaat) Standaard (171x258 mm); breedte (206x330 mm)
⚠ Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen ⚠ - Verzekert dat de juiste maat wordt gebruikt voor de gebruiker en dat de maat wordt herzien nadat de gebruiker gegroeid is. - Wees u bewust van mogelijke positioneringsconflicten met de dijkussens (6.1.3). - Het rugcontourkussen moet worden gebruikt met de meegeleverde padding.	

6.1.5 Borstriem van het rugcontourkussen	Omschrijving
	Gewatteerde borstriem met klittenbandsluiting. Beoogd gebruik: de borstriem van het rugcontourkussen is een optie om de gebruiker ondersteuning te bieden aan de voorkant van de borst. Toepassing: de borstriem van het rugcontourkussen is een accessoire voor het rugcontourkussen en wordt rond de achterkant ervan en door de laterale sleuven van het rugcontourkussen gemonteerd. De riem is in maat verstelbaar met behulp van de klittenbandsluiting. Stijlen: klittenbandsluiting, met of zonder gesp met zijsluiting. De versie met klittenbandsluiting kan door de gebruiker worden versteld en losgemaakt, terwijl de versie met gesp bedoeld is om te voorkomen dat de gebruiker de riem zelf kan openen. Maten: er zijn borstriemen over de volledige breedte (105 mm) en babyborstriemen over de halve breedte (50 mm) beschikbaar.
⚠ Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen ⚠ - Dit is GEEN beveiligingssysteem en het is niet bedoeld om te worden gebruikt om de gebruiker in de stoel vast te houden. - Gebruik de riem altijd in combinatie met een correct gepositioneerde positioneringsriem voor het bekken (6.1.1) om het risico op wurging te voorkomen. - De riem moet goed om de borst zitten, maar mag de regelmatige ademhaling op geen enkele manier beperken. - De armen van de gebruiker moeten vrij blijven.	

6.1.6 Vrijstaande borstriem	Omschrijving
	Gewatteerde borstriem met klittenbandsluiting. Beoogd gebruik: de vrijstaande borstriem is een gewatteerde ondersteuning die wordt gebruikt om de positionering van het bovenlichaam te ondersteunen. Toepassing: de vrijstaande borstriem kan rechtstreeks op de 'bovenste of onderste' standaard- of hoge rugleuningen van de Breezi worden gemonteerd via een enkel gat in de leuning. Stijlen: bevestigd met klittenband, met of zonder gesp met zijsluiting. Opmerking: de versie met klittenbandsluiting kan door de gebruiker worden versteld en losgemaakt, terwijl de versie met gesp bedoeld is om te voorkomen dat de gebruiker de riem zelf kan openen.

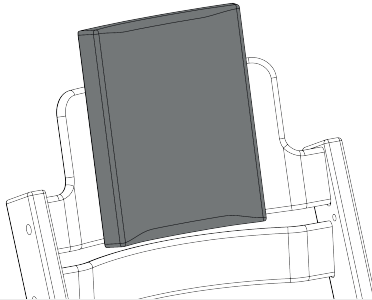
⚠ Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen ⚠

- Dit is GEEN beveiligingssysteem en het is niet bedoeld om te worden gebruikt om de gebruiker in de stoel vast te houden.
- Gebruik de riem altijd in combinatie met een correct gepositioneerde positioneringsriem voor het bekken (6.1.1) om het risico op wurging te voorkomen.
- De riem moet goed om de borst zitten, maar mag de regelmatige ademhaling op geen enkele manier beperken.
- De armen van de gebruiker moeten vrij blijven.
- Kan niet worden gebruikt in combinatie met bepaalde accessoires zoals een rugcontourkussen (6.1.4).

6.1.7 Bodypoint™ -positioneringsharnas vooraan	Omschrijving
	Beoogd gebruik: positioneringsharnassen vooraan zijn een hulpmiddel voor het uitlijnen van de romp en schouders voor een betere houding en functionele positionering voor gebruikers die de bewegingen van hun romp niet goed beheersen. Toepassing: dit product moet worden gemonteerd met behulp van de meegeleverde bevestigingskit (geschikt voor gebruikers tot 75 kg). OPMERKING: de bovenste riemen moeten horizontaal liggen tussen de schouders en de bovenkant van de rugleuning en hiervoor kan er een hoge rugleuning nodig zijn. Maten: harnassen vooraan komen in 6 maten. Voor schouderbreedtes: <240 mm (XXS); 240-280 mm (XS); 280-330 mm (S); 330-410 mm (M); 410-480 mm (L); >480 mm (XL). Stijlen: draaibare schouderharnassen (standaard en dynamisch); Stayflex-borstharnassen (standaard of met smalle breedte; met of zonder ritsluiting in het midden).

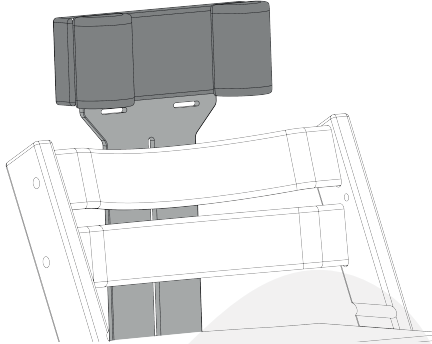
⚠ Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen ⚠

- Wegens het mogelijke risico op wurging is het gevaarlijk om dit product te gebruiken zonder het bekken te stabiliseren. Gebruik het altijd met een goed gemonteerde positioneringsriem voor het bekken (6.1.1).
- Dit product mag alleen worden gebruikt voor het positioneren van een persoon in een stoel. Het is NIET bedoeld voor gebruik als een transportveiligheidsvoorziening, als een persoonlijk beveiligingssysteem of voor een andere toepassing waar fouten kunnen leiden tot letsels. Verkeerd gebruik van dit product is niet toegestaan en onveilig.
- Deze steun voor de voorromp moet goed worden gemonteerd om de romp en schouders van de gebruiker te ondersteunen zonder letsels te veroorzaken. Laat uw zitspecialist de juiste afstelling en het juiste gebruik demonstreren.
- Als het harnas te strak zit, kan het de ademhaling beperken en de druk op de schouders en borst verhogen.
- Als het harnas te los zit, kan het ertoe leiden dat de gebruiker omlaag glijdt, waardoor er een risico op wurging is.
- Als dit product per ongeluk wordt losgemaakt, kan dit ertoe leiden dat de gebruiker naar voren valt.
- Als de gebruiker zichzelf niet kan losmaken, kan dit gevaarlijk zijn wanneer de gebruiker omlaag glijdt of tijdens een noodgeval vast komt te zitten in de stoel.
- Als de fysieke of cognitieve capaciteiten van de gebruiker hem/haar verhinderen om dit product veilig te bedienen, moet er te allen tijde een verzorger aanwezig zijn tijdens het gebruik ervan. Verzekert dat alle verzorgers weten hoe ze het product correct moeten verstellen en losmaken. Als de hoogte van de zitplaat aangepast is, kan dit leiden tot een onjuiste positionering van de harnasriemen.

6.1.8 Hoog rugkussen	Omschrijving
	Gebogen gewatteerde blok, bevestigd aan een hoge rugleuning. Beoogd gebruik: het hoge rugkussen kan worden gebruikt om de rugsteun hoger te maken of om het hoofd te ondersteunen. Toepassing: het hoge rugkussen wordt bevestigd aan een hoge rugleuning. Afmeting: 230x280 mm (BxH)

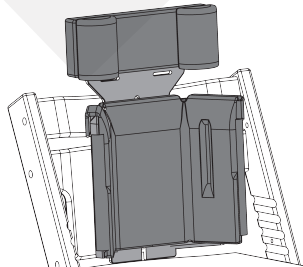
⚠ Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen ⚠

- Gebruik het kussen niet als handgreep om de stoel te manoeuvreren.
- Niet geschikt voor gebruikers met gespannen spieren (d.w.z. hoge tonus)
- Niet compatibel met het rugcontourkussen (6.1.4).
- Niet geschikt voor gebruik met een schouder- of borstharnas.

6.1.9 Hoofdsteen	Omschrijving
	Gewatteerde blok, bevestigd aan een in de hoogte verstelbare houten stok die wordt gebruikt om het hoofd te beschermen. Beoogd gebruik: de hoofdsteen stelt de gebruiker in staat om zijn hoofd van tijd tot tijd te laten rusten tijdens het zitten. De hoofdsteen is NIET bedoeld als toegewezen hoofdsteen. Toepassing: de hoofdsteenassemblage wordt ingevoerd door de twee bevestigingspunten achter de rugleuningen en de hoogte kan indien nodig worden aangepast. Stijlen: met en zonder 'vleugels'. De vleugels dienen als waarschuwing voor wanneer het hoofd naar de zijkant afdwaalt.

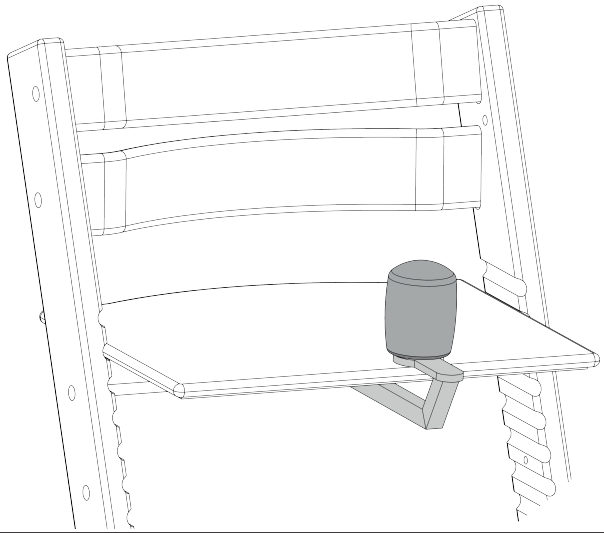
⚠ Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen ⚠

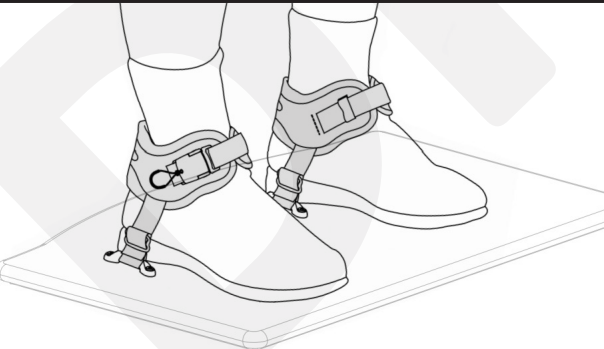
- Dit is enkel een hoofdsteen.
- De hoofdsteen is NIET bedoeld als toegewezen hoofdsteen, d.w.z. hij mag niet worden gebruikt om het hoofd te stabiliseren, formeel te ondersteunen of te positioneren.
- De hoofdsteen is niet geschikt voor gebruikers met gespannen spieren (d.w.z. hoge tonus)
- Verzekert dat de hoofdsteen wordt aangepast naarmate de gebruiker groeit.
- Gebruik het kussen niet als handgreep om de stoel te manoeuvreren.

6.1.9.1 Hoofdsteen voor het rugcontourkussen	Omschrijving
	Gewatteerde blok, bevestigd aan een in de hoogte verstelbare houten stok die wordt gebruikt om het hoofd te ondersteunen. Beoogd gebruik: zie 6.1.9 Toepassing: de hoofdsteenassemblage wordt achter het rugcontourkussen geplaatst (6.1.4) en de hoogte kan indien nodig worden aangepast. Stijlen: zie 6.1.9

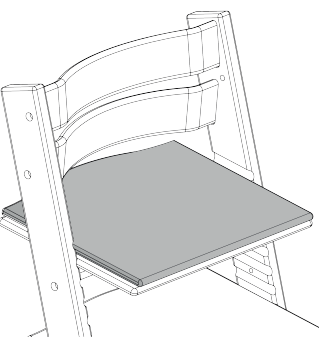
⚠ Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen ⚠

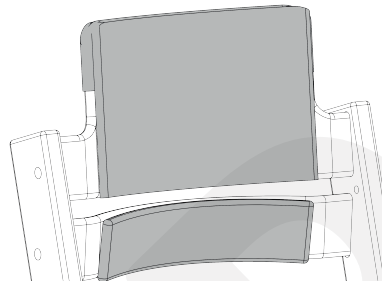
Zie 6.1.9

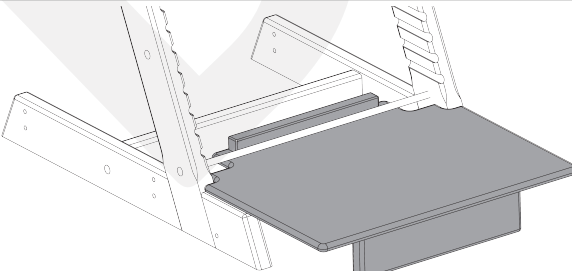
6.1.10 Mediaal kniekussen (Pommel)	Omschrijving
	Gewatteerd cilindrisch kussen om tussen de knieën van de gebruiker te zetten. Beoogd gebruik: het mediaal kniekussen wordt gemonteerd op de zitplaat en zit tussen de knieën om de abductie van de knie en de dij te bevorderen. Toepassing: het mediaal kniekussen wordt op een centrale positie op de zitplaat geplaatst, zodat het direct tussen de knieën (in tegenstelling tot tussen de dijen) boven de plaat zit. Maten en stijlen: het kussen is verkrijgbaar in 2 maten, klein (diameter van 60 mm x 80 mm L), groot (diameter van 90 mm x 100 mm L). Het kussen wordt bevestigd aan een in de diepte verstelbare snelspannerbevestiging die op de basis van de zitplaat is geschroefd en door middel van een bout door de zitplaat wordt gestoken.
⚠ Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen ⚠	
- Het mediale kniekussen mag alleen worden gebruikt om de knieën te scheiden (d.w.z. knieabductie) en NIET voor een ander gebruik. - Mag NIET gebruikt worden als een beveiligingssysteem. - Gebruik het mediale kniekussen NIET om te voorkomen dat de gebruiker naar voren schuift tijdens het zitten. (Dit moet worden bereikt door het gebruik van een correct gepositioneerde positioneringsriem voor het bekken en/of zitwikkussen (6.1.1). - Niet geschikt voor gebruikers met gespannen spieren (d.w.z. hoge tonus) zonder het extra gebruik van een correct gepositioneerde positioneringsriem voor het bekken (6.1.1). - Het kussen is niet ontworpen om te worden gebruikt als een handgreep voor het manoeuvreren van de stoel of voor het verstellen van de zitplaat. - Er moet worden nagedacht in hoeverre het kussen de gebruiker belemmert om zelfstandig in en uit de stoel te stappen.	

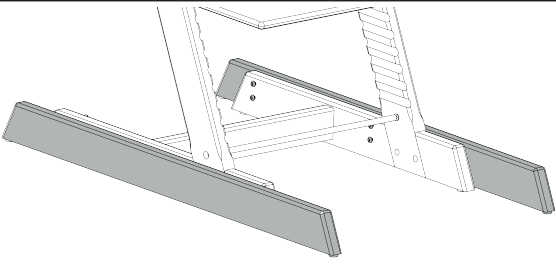
6.1.11 Enkelbevestigingsriemen van Bodypoint™	Omschrijving
	Beoogd gebruik: enkelbevestigingsriemen gebruikt om de voeten van de gebruiker op de voetplaat te houden. Toepassing: bevestig de enkelbevestigingsriemen aan de voetplaat met behulp van de bevestigingskit die bij de enkelbevestigingsriemen geleverd is. De mate van bewegingsvrijheid kan worden geregeld door de positionering van de bevestigingslussen dicht bij of verder van de voeten plaatsen en door de spanning op de verticale riemen. Maten: de enkelbevestigingsriemen zijn er in 5 maten. Voor een enkelomtrek: <170 mm (XS); 170-200 mm (S); 200-230 mm (M); 230-280 mm (L); >280 mm (XL).
⚠ Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen ⚠	
- Enkelbevestigingsriemen mogen alleen worden gebruikt bij personen die een goed gemonteerde positioneringsriem voor het bekken dragen (6.1.1). - Enkelbevestigingsriemen mogen alleen worden aangebracht en gedragen over alledaags schoeisel. Dik gevoerde schoenen en orthesen kunnen de juiste pasvorm verstoren. - Als de fysieke of cognitieve capaciteiten van de gebruiker hem/haar verhinderen om dit product veilig te bedienen, moet er te allen tijde een verzorger aanwezig zijn tijdens het gebruik ervan. Verzekert dat alle verzorgers weten hoe ze het product correct moeten verstellen en losmaken.	

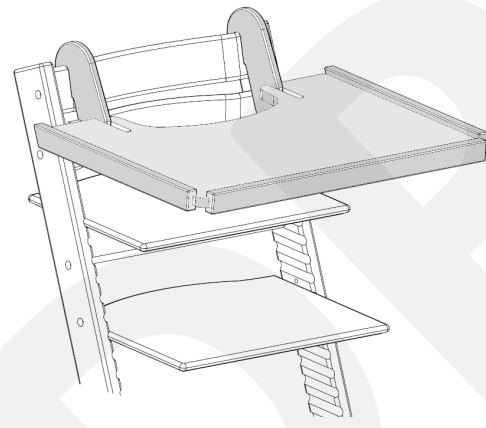
6.2 Algemene accessoires

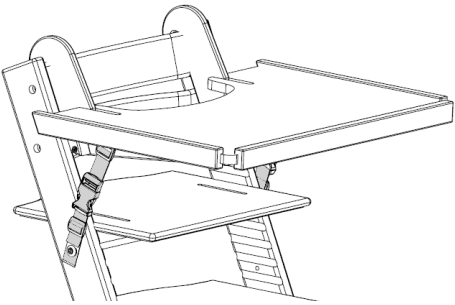
6.2.1 Zitkussen	Omschrijving
	Met stof bekleed schuimkussen met laag profiel voor gebruik op de zitplaat. Beoogd gebruik: dankzij de vulling biedt het extra comfort aan de gebruiker tijdens het zitten. Toepassing: zitkussens worden met klittenband aan de bovenkant van de zitplaat bevestigd. Stijlen en maten: de stijlen van de zitkussens beslaan de volledige plaatbreedte of de halve breedte (HC). Zitkussens van halve breedte (HC) moeten worden gebruikt met een plaat met enkele sleuf of dubbele sleuf en passen tussen de sleuven. Maten die standaard overeenkomen met de plaatafmetingen (BxD): (BxD) 15x11" (386x282 mm), 15x13" (386x335 mm), 17x12" (424x314 mm), 17x14" (424x364 mm), 18x16" (460x411 mm), 18x18" (460x460 mm).
⚠ Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen ⚠	
- Het zitkussen is NIET bedoeld om het risico op drukgerelateerde weefselletsels voor de gebruiker te verminderen. - Gebruik zitkussens alleen als ze aan de zitplaat zijn bevestigd.	

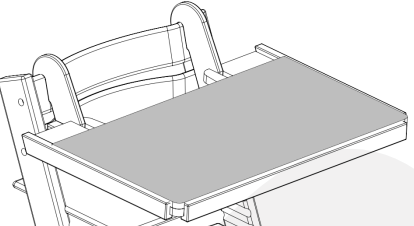
6.2.2 Rugleuningskussen	Omschrijving
	Met stof bekleed schuimkussen met laag profiel voor gebruik op de rugleuning. Beoogd gebruik: dankzij de vulling biedt het extra comfort aan de gebruiker tijdens het leunen tegen de rugleuningen. Toepassing: bevestigd aan de rugleuning met klittenband. Stijlen: er is één maat, maar drie verschillende ontwerpen voor gebruik met respectievelijk de standaardrugleuningen, hoge rugleuningen en omgekeerde rugleuningen.
⚠ Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen ⚠	
- Het rugleuningskussen is NIET bedoeld om het risico op drukgerelateerde weefselletsels voor de gebruiker te verminderen. - Het kan niet worden gebruikt in combinatie met accessoires die via de rugleuning zijn bevestigd (bijv. het rugcontourkussen (6.1.4))	

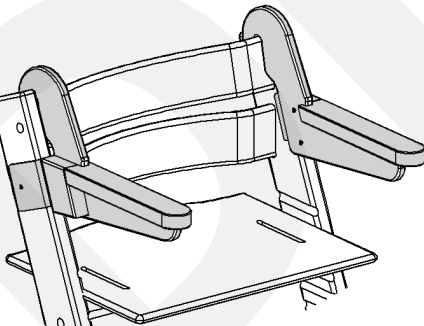
6.2.3 Transfertrapje	Omschrijving
	Verlengde houten plaat met voorsteun. Beoogd gebruik: het transfertrapje kan worden gebruikt als voetplaat op een lagere positie dan de laagste sleuven in de Z-poot, of als een trapje om de voetplaat te bereiken. Toepassing: het transfertrapje rust bovenop het horizontale deel van de Z-poot en zit vastgehaakt achter de onderste dwarslat. Alle transfertrapjes kunnen worden gebruikt in combinatie met een Millie Mova. Maten: Teezi, Breezi, Breezi Max
⚠ Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen ⚠	
- Verzekert dat de achterkant van het trapje goed is gehaakt onder de onderste dwarslat, d.w.z. niet ervoor. - Niet compatibel met het LLMF (6.3.1) noch met ski's met zwenkwielen (6.3.2). - Het transfertrapje verhoogt de voorwaartse stabiliteit van de stoel NIET	

6.2.4 Stabiliserende ski's	Omschrijving
	Houten 'ski's' ontworpen om de voetafdruk van de stoel te vergroten. Beoogd gebruik: de stabiliserende ski's vergroten het vloercontactoppervlak van de stoel en verkleinen het kantelgevaar van voor naar achteren. Diepte van de ski's; Teezi 758 mm, Breezi 870 mm, Breezi Max 960 mm. Toepassing: de stabiliserende ski's worden vastgeschroefd aan de horizontale delen van de Z-poten. Er kunnen optionele zwenkwielen (6.3.2) worden toegevoegd. Maten: Teezi, Breezi, Breezi Max
! Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen !	
- De ski's moeten altijd aan beide zijden van de stoel worden geïnstalleerd. - De ski's verminderen alleen het risico op kantelen van voren naar achteren, maar elimineren het risico niet: voorzichtigheid is nog steeds belangrijk. - Houd er rekening mee dat er een verhoogd struikelgevaar is voor personen die rond de stoel stappen. - Niet compatibel met Millie Mova (6.3.3).	

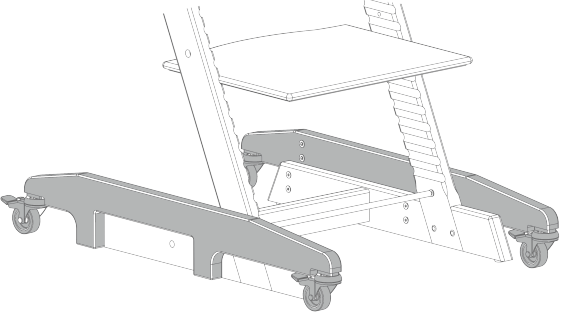
6.2.5 Tray	Omschrijving
	Afveegbaar werkoppervlak met verheven randen om te voorkomen dat items van de bovenkant van de tray rollen. Beoogd gebruik: een platform om te gebruiken, wanneer een tafelblad geen optie is, voor maaltijden, werk of spelletjes. Kan ook ondersteuning aan het bovenlichaam bieden. Het oppervlak is glad genoeg om met de meeste zuignaptoepassingen te werken. Toepassing: wordt vastgehaakt aan de bovenste leuning van de stoel en kan op zijn plaats worden gehouden met de optionele trayriem (6.2.6). Maten en stijlen: trayoppervlak 600x395 mm (BxD) voor alle trayformaten. De armsteunsleuven in trays zijn goed gepositioneerd voor de trays van de Teezi, Breezi en Breezi Max. Uitsparingen: 110 mm diep voor de trays van de Teezi en Breezi; 140 mm voor de trays van de Breezi Max. Diepe uitsparingen: 150 mm diep voor de trays van de Teezi en Breezi; 190 mm voor de trays van de Breezi Max. Lengteopties voor armsteun (bovenkant rugleuning tot trayoppervlak): standaard 60 mm; lang 135 mm; verlengd 175 mm.
! Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen !	
- De tray is NIET bedoeld om de gebruiker in de stoel te houden en werkt op geen enkele manier als een beveiligingssysteem voor de gebruiker. - Niet compatibel met armsteunen (6.2.8). - Verzekert dat de gekozen armlengte compatibel is met de lengte van de gebruiker en de hoogte van de zitplaat (zie afbeelding 2 in sectie 5.2). - Er moeten trayriemen (6.2.6) worden gebruikt als de gebruiker per ongeluk de tray kan optillen. - Wanneer u de tray optilt, moet u erop toezien dat u de gebruiker niet verwondt. Houd bijvoorbeeld rekening met de positie van het hoofd en de armen. - Er is een optie met trayvulling (6.2.7) beschikbaar, als de gebruiker het hoofd tegen onderdelen van de tray kan slaan.	

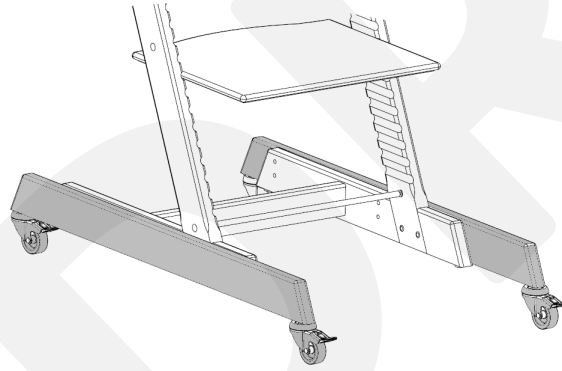
6.2.6 Trayriemen	Omschrijving
	Riemen met gesp met zijsluiting. Beoogd gebruik: trayriemen worden gebruikt om te voorkomen dat de tray (6.2.5) door de gebruiker van de rugleuning wordt getild. Toepassing: trayriemen worden aan het ene uiteinde van de zijkant van de tray en aan het andere uiteinde aan de Z-poten bevestigd, aan elke kant van de tray, en ze worden op hun plaats gehouden met een gesp met zijsluiting. Maten: een enkele maat voor alle trays.
! Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen !	
- Verzekert dat de twee delen van de riem stevig vastzitten en goed gespannen zijn wanneer de riem gebruikt wordt. - Verzekert dat de riemen zo zijn afgesteld dat ze strak zitten tijdens het gebruik. - Verzekert dat de riemen losgekoppeld zijn, voordat u de tray verwijdt.	

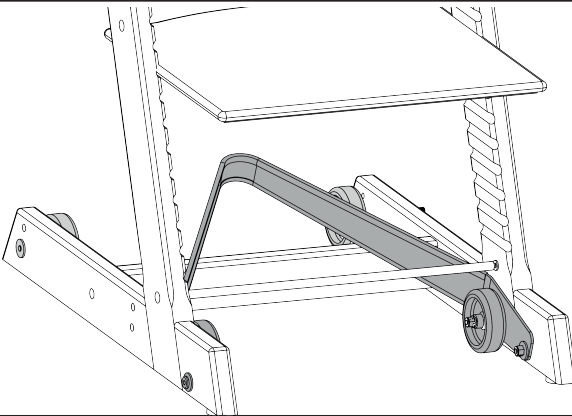
6.2.7 Trayonderlegger	Omschrijving
	Beoogd gebruik: de trayonderlegger kan gebruikt worden wanneer er een risico is dat de gebruiker de lichaamsdelen tegen de tray stoot of slaat. Toepassing: de trayonderlegger ligt over de tray (6.2.5) en wordt op zijn plaats gehouden met klittenbandbevestigingen. Stijlen: de standaardstijl bedekt alleen het oppervlak en de randen van de tray, met een optie om ook de armen van de tray te bedekken.

6.2.8 Armsteunen	Omschrijving
	Houten armsteunen met metalen beugelbevestiging. Beoogd gebruik: armsteunen bieden enige hulp bij laterale positioneringen en kunnen worden gebruikt als een grijppunt om de gebruiker te helpen bij het betreden en verlaten van de stoel. Toepassing: over de bovenste leuning gehaakt en vervolgens in de Z-poten geschroefd. Maten: twee armlengtes: kort (90 mm) en lang (190 mm). Twee armdieptes: standaard (228 mm) en diep (255 mm).
! Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen !	
- Niet compatibel met trays (6.2.5). - De armsteunen moeten aan de Z-poten worden bevestigd met schroeven volgens de instructies 'Hoe te monteren' (en niet gewoon aan de rugleuning worden gehaakt). - Mag NIET gebruikt worden als een laterale rompsteun.	

6.3 Mobiliteitsaccessoires

6.3.1 Laag mobiliteitsframe	Omschrijving
	Een laag mobiliteitsframe (LLMF) is een vastgeschroefd systeem met zwenkwielen aan de uiteinden. Beoogd gebruik: een laag mobiliteitsframe (LLMF) zorgt ervoor dat de stoel naar een andere plaats kan worden gereden en zorgt ervoor dat de kans op omkantelen van voren naar achteren kleiner is. Het LLMF kan worden gebruikt om de stoel tot 50 mm hoger te maken. Toepassing: het LLMF wordt vastgeschroefd aan de buitenkant van het onderste deel van de Z-poten. De zwenkwielen worden geremd wanneer de hendel in de neerwaartse stand staat en remmen niet met de hendel in de horizontale stand. De remmen kunnen met de voet bediend worden. Maten: Teezi, Breezi en Breezi Max
⚠ Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen ⚠ • Verplaats de stoel NIET met de gebruiker erop voor langere afstanden. Verplaats de stoel enkel voor korte afstanden, bijvoorbeeld van en naar een tafel. • Verzekert dat de rem op alle zwenkwielen staat wanneer de stoel in de gewenste positie staat, voordat de gebruiker probeert op de stoel te gaan zitten en tijdens het zitten. • Verzekert dat de rem niet op de zwenkwielen staat bij het verplaatsen van de stoel. • Gebruik bij het verplaatsen van de stoel de bovenkant van de poten als 'handgrepen' en niet eventuele accessoires. • Hoewel het LLMF dankzij de langwerpige basis het risico op omkantelen verkleint, kan er niet volledig gegarandeerd worden dat omkantelen vermeden wordt. Wees dus nog steeds voorzichtig.	

6.3.2 Stabiliserende ski's met zwenkwielen	Omschrijving
	De stabiliserende ski's met zwenkwielen zijn een vastgeschroefd systeem met zwenkwielen aan de uiteinden. Beoogd gebruik: de stabiliserende ski's (6.2.4) zijn accessoires die worden gebruikt om het risico op omkantelen van voren naar achteren te verkleinen. De optie om zwenkwielen aan deze ski's toe te voegen, zorgt ervoor dat de stoel op de wieltjes kan worden verplaatst. Toepassing: de ski's worden vastgeschroefd aan de buitenkant van het onderste deel van de Z-poten. De zwenkwielen worden geremd wanneer de hendel in de neerwaartse stand staat en remmen niet met de hendel in de horizontale stand. De remmen kunnen met de voet bediend worden. Maten: Teezi, Breezi en Breezi Max
⚠ Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen ⚠ • Verplaats de stoel NIET met de gebruiker erop voor langere afstanden. Verplaats de stoel enkel voor korte afstanden, bijvoorbeeld van en naar een tafel. • Verzekert dat de rem op alle zwenkwielen staat wanneer de stoel in de gewenste positie staat, voordat de gebruiker probeert op de stoel te gaan zitten en tijdens het zitten. • Verzekert dat de rem niet op de zwenkwielen staat bij het verplaatsen van de stoel. • Gebruik bij het verplaatsen van de stoel de bovenkant van de poten als 'handgrepen' en niet eventuele accessoires. • Hoewel de stabiliserende ski's dankzij de langwerpige basis het risico op omkantelen verkleinen, kan er niet volledig gegarandeerd worden dat omkantelen vermeden wordt. Wees dus nog steeds voorzichtig. • De stabiliserende ski's met zwenkwielen maken de stoel hoger dankzij de hoogte van de zwenkwielen (ongeveer 50 mm). Houd dus rekening met de positie van de gebruiker en de accessoires ten opzichte van een bepaald werkoppervlak en de impact op het vermogen van de gebruiker om zelfstandig op de stoel te gaan zitten en eruit te gaan.	

6.3.3 Millie Mova	Omschrijving
	Met de voet bediend metalen frame dat in de basis van de stoel zit. Beoogd gebruik: hiermee kan een verzorger de stoel gemakkelijk verplaatsen met de gebruiker erin over korte afstanden, zonder de stoel op te tillen of te slepen. Toepassing: een attachment aan de basis van de Z-poten die handmatig wordt 'geactiveerd' door de verzorger die met zijn voet op de V-vormige metalen hendel aan de achterkant van de stoel drukt. De stoel gaat terug naar de rustpositie zonder wielen, wanneer de verzorger de voet van de V-vormige metalen hendel haalt. Maten: te bevestigen aan de standaardstoel (Breezi) of brede stoel (Breezi Max). (Opmerking: er is geen maat voor de smalle stoelen (Teezi))
⚠ Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen ⚠ • De Millie Mova is ontworpen om de stoel enkel over korte afstanden te verplaatsen, bijvoorbeeld naar of van een eettafel. • De met de voet bediende hendel mag nooit in de neerwaartse stand worden vergrendeld, omdat de stoel dan op zijn wielen zonder rem blijft staan. • Niet compatibel voor gebruik met stabiliserende ski's (6.2.4 of 6.3.2) noch met een laag mobiliteitsframe (6.3.1).	

7. Routinematige zorg, onderhoud, reiniging, desinfectie en verwijdering

7.1 Dagelijkse controles/onderhoud

Het is aanbevolen dat verzorgers een periodieke controle uitvoeren om te verzekeren dat alle bouten goed vastzitten en dat ze de stoel ook inspecteren op scheuren, breuken, losse onderdelen of defecten, enz. Als er onderdelen zodanig beschadigd zijn dat er een splinter kan ontstaan, moet het hout op dat gebied worden geschuurd om eventuele scherpe randen/splinters te verwijderen. Wanneer er riemen of harnassen worden gebruikt, controleer dan of deze compleet zijn en of de band ervan niet is gerafeld.

7.2 Routinematige reiniging

De Breezi-stoel moet tijdens het gebruik periodiek worden gereinigd, wat een goede praktijk is voor alle herbruikbare medische hulpmiddelen. De onderdelen mogen enkel worden gereinigd met een vochtige doek en reinigingsmiddel of met een alcoholdoekje. Dompel geen van de onderdelen onder in water. Gebruik geen gemechaniseerde was-, desinfectie- of sterilisatieapparatuur en stoom niet schoon. Controleer na het reinigen of het product droog is voor gebruik of opberging.

7.2.1 Hergebruik voor meerdere patiënten/gebruikers (desinfectie)

Voordat u de Breezi-stoel opnieuw gebruikt bij een andere klant, moet de stoel grondig gereinigd en gedesinfecteerd zijn in overeenstemming met de lokale richtlijnen voor infectiepreventie. Vermijd bijtende materialen en reinigingschemicaliën zoals bleekmiddel, oplosmiddelen of schuurmiddelen, omdat deze de materialen die in de constructie van de stoel zijn gebruikt, kunnen beschadigen. Controleer na de reiniging/desinfectie of het product droog is voordat het opnieuw gemonteerd of opgeborgen wordt. Als u twijfelt over de manier waarop u de Breezi-stoel efficiënt kunt reinigen of desinfecteren, raadpleeg dan uw plaatselijke specialist voor infectiepreventie.

7.3 Recyclage en veilige verwijdering

De onderdelen en accessoires voor de Breezi-stoelen zijn modulair van aard en kunnen opnieuw worden gebruikt in nieuwe samenstellingen na een juiste evaluatie van de gebruiker en na een reiniging/desinfectie zoals uiteengezet in sectie 7.2.1. Alle hoofdonderdelen van de byBES Breezi-activiteitenstoelen zijn vervaardigd uit beukenhout, beukenlaminatmultiplex en berkenmultiplex, met metalen bevestigingen en ze zijn verpakt in kartonnen dozen. Al deze items kunnen gerecycleerd worden in overeenstemming met de lokale richtlijnen voor afvalrecycling. De gestoffeerde items, riemen en harnassen kunnen momenteel niet worden gerecycleerd.

8. Technische specificaties en xtra informatie

8.1 Technische specificaties

	Teezi	Breezi	Breezi Max
Maximaal gewicht van de gebruiker	65 kg	75 kg	85 kg
Breedte van de stoel	42 cm (16,5")	46 cm (18")	51 cm (20")
Hoogte van de stoel (met standaardrugleuning)	65 cm (25,5")	77 cm (30")	93 cm (36,5")
Plaatpositioneringsleuven in Z-poten	12 sleuven	16 sleuven	21 sleuven
De hoogte van de zitplaat/voetplaat van de vloer	Min: 12 cm (4,7") Max: 44 cm (17")	Min: 14 cm (5,5") Max: 55 cm (21,5")	Min: 14 cm (5,5") Max: 69 cm (27")
Minimaal gewicht van de basisstoel (geen accessoires)	7 kg	8 kg	11 kg
Afmetingen van de zitplaat/voetplaat (breedte x diepte)	38,6 x 28,2 cm (15x11") 38,6 x 33,5 cm (15x13")	42,4 x 31,4 cm (17x12") 42,4 x 36,4 cm (17x14")	46 x 41,1 cm (18x16") 46 x 46 cm (18x18")
Bruikbare zitbreedte zonder accessoires	37 cm (14,5")	41 cm (16")	44,5 cm (17,5")
Breedte tussen de sleuven voor de positioneringsriem voor het bekken (6.1.1)	26,5 cm (10,4")	30,5 cm (12")	34,5 cm (13,6")
Bruikbare zitbreedte met de laterale dijkusens (6.1.3) op hun plaats (min tot max)	Min: 13,5 cm (5,3") Max: 26 cm (10,2")	Min: 17 cm (6,7") Max: 30 cm (11,8")	Min: 21 cm (8,3") Max: 33,5 cm (13")

- Opmerkingen:
1. Hybride variaties van de Breezi-stoelen zijn ook mogelijk door de breedtes van de platen en rugleuning te veranderen om langere, smallere of minder brede opties te bekomen.
 2. De producten zijn vrij van TSE-relevante afgeleide materialen, geneeskrachtige stoffen, derivaten van menselijk bloed en ftalaten.

8.2 Levensduur en houdbaarheid

VERWACHTE LEVENSDUUR: de verwachte levensduur van de stoel zelf is 10 jaar en 2 jaar voor de accessoires.
GESPECIFICEERDE HOUDBAARHEID: het product heeft geen gespecificeerde houdbaarheid.

8.3 Fabrieksgarantie

Alle Breezi-stoelen hebben een fabrieksgarantie van 10 jaar voor fabricagefouten.
Alle Breezi-stoelaccessoires hebben een fabrieksgarantie van 2 jaar voor fabricagefouten.

Geleverd door:



Bes Healthcare Limited:
131 South Liberty Lane
Ashton Vale
Bristol
BS3 2SZ
Groot-Brittannië
T: +44 (0) 1179 666 761
F: +44 (0) 1179 637 373
E: info@beshealthcare.net
W: www.beshealthcare.net



Verordening (EG) nr. 2017/745 inzake
medische hulpmiddelen



UK Medical Device Regulation 2002
(SI 2002 nr. 618, zoals gewijzigd)



Advena Ltd. Tower Business Centre, 2nd Flr.,
Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta