

Gebrauchsanleitung Proflebo All-in



- Hilfe beim An- und Ausziehen von Kompressionsstrümpfen mit offener und geschlossener Spitze
- Einfach zu verwenden
- Robustes, dauerhaftes Material
- Handwäsche bei 30°C



Zusammensetzung:
40D Polyester
Anstrich: PU, Silicone

Ausziehhilfe Proflebo All-in-1




1
Ziehen Sie den All-in-1 über den Strumpf



2
Wickeln Sie das Gummiband oberhalb der Knöchel um den All-in-1



3
Schließen Sie das Gummiband mit einer mittleren Spannung

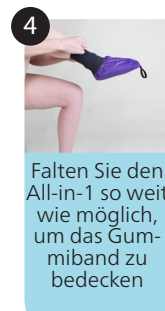

4
Falten Sie den All-in-1 so weit wie möglich, um das Gummiband zu bedecken



5
Greifen Sie Ihren Strumpf und ziehen den Strumpf aus

Anziehhilfe Proflebo All-in-1 (Strumpf mit offener Spitze)

1



Stecken Sie Ihren Fuß im All-in-1

2



Ziehen Sie den Strumpf über den All-in-1 bis knap über den Knöchel

3



Ziehen Sie den Strumpf an der richtigen Stelle (3 und 4)

4



Greifen Sie die schwarze Schlaufe des All-in-1, die sich an den Zehen befindet

5



Ziehen Sie die schwarze Schlaufe, bis den All-in-1 aus

Anziehhilfe Proflebo All-in-1 (Strumpf mit geschlossener Spitze)

1



Stellen Sie den Fuß wie angegeben und befestigen Sie das Gummiband um die Wade. Die Schlaufe befindet sich unterhalb des Knies

2



Setzen Sie Ihren Fuß in den Strumpf

3



Ziehen Sie den Strumpf an die richtige Stelle

4



Öffnen Sie das Gummiband

5



Ziehen Sie den All-in-1 bis sie heraus ist